

Instrucțiuni de utilizare

Sistem de poziționare Confort Plus Duo Stabilo System



Tip

Confortable Plus Duo Velcro

Altă denumire: Stairclimber Duo Velcro

Confortable Plus Duo Hilo Velcro




Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. NOEL a proiectat și fabricat Comfortable Plus Duo Velcro Stabulo System la cele mai înalte standarde de siguranță și utilizare funcțională. Suntem încrezători că produsul nostru va satisface cele mai înalte cerințe și așteptări. Aceste instrucțiuni de utilizare fac parte integrantă din Comfortable Plus Duo Stabulo System. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.

Sistem de poziționare prin vid pentru stabilizarea trunchiului, capului și membrelor - Comfortable Plus Duo Velcro Stabulo System

Sistemul de poziționare prin vid Comfortable Plus Duo cu Velcro – Stabulo System este un produs conceput pentru copii și adulți cu paralizie cerebrală și mielomeningocel, care compensează și atenuează dizabilitatea prin stabilizarea trunchiului, capului și membrelor în poziția de șezut. Sistemul de poziționare Comfortable Plus Duo cu Velcro – Stabulo System poate fi utilizat pentru compensarea deformărilor trunchiului și pentru stabilizarea pacienților cu flaciditate

INDICAȚII

- Paralizie cerebrală
- Mielomeningocel
- Deformări ale trunchiului
- Flaciditate

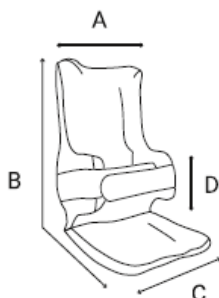

Tip	Dimensiuni (cm)				Înălțimea utilizatorului (cm)
	A	B	A	B	
S	30	80	58	28	< 1.00
M	35	95	65	28	1.00 – 1.25
L	40	115	75	35	1.25 -1.65
XL	45	120	85	35	>1,65

Pernele Sistemului de poziționare Comfortable Plus Duo cu Velcro – Stabilo System sunt acoperite cu un material exterior special care permite fixarea benzilor Velcro. Banda Velcro face parte din Sistemul Comfortable Plus Duo – Stabilo System. Sistemul Comfortable Plus Duo cu Velcro Hilo – Stabilo System are, de asemenea, o pernă suplimentară de abducție, care reduce contracturile și asigură poziționarea corectă a picioarelor în poziția de șezut

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU PRODUS

- **Sistemul de poziționare Comfortable Plus Duo cu Velcro – Stabilo System trebuie fixat ferm pe scaune sau spătare.**
- **Se recomandă utilizarea unei huse aerisite dacă este necesară o ventilație sporită în jurul corpului.**
- **Evitați contactul cu obiecte ascuțite care ar putea deteriora perna.**
- **Nu curățați cu soluții pe bază de solvenți, de exemplu tolueen sau acetonă.**
- **Nu trageți de supapă.**
- **Nu supraîncărcați perna cu aer.**
- **Folosiți doar pompa specială inclusă cu perna pentru umflare.**
- **Nu călcați.**
- **În caz de rupere, micro-granulele pot scăpa, ceea ce poate fi periculos pentru copii mici.**
- **Dispozitivul poate fi utilizat doar de persoanele care au primit instrucțiuni sau instruire.**

CONTRAINDICAȚII

Greutatea permisă a utilizatorului 80 kg

ATENȚIE

- **Grosimea saltelei se poate reduce în mod natural cu 5% în perioada inițială de utilizare**
- **În cazul unor modificări considerabile ale temperaturii, utilizați din nou pompa pentru a obține o duritate adecvată (temperatura mai ridicată înmoaie salteaua, temperatura mai scăzută întărește salteaua)**

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE

Pompa manuală

1. Scoateți tubul din mânerul pompei.
2. Înșurubați tubul în supapa pernei și așteptați până când perna atinge fermitatea dorită.
3. Modelați perna (fie manual pentru ajustarea formei, fie prin așezarea sau sprijinirea pe ea).
4. Înșurubați pompa în tub și evacuați aerul până se obține fermitatea dorită.
5. Scoateți tubul din pompă și înșurubați capacul de protecție pe supapă.
6. Pentru a schimba forma – înșurubați din nou tubul în supapă și așteptați ca perna să se înmoaie, apoi repetați pașii de la 2 la 5.



Pompa electrică

1. Scoateți tubul din cutia cu pompă electrică.
2. Desurubați capacul supapei, înșurubați tubul (partea filetată) în supapa saltelei și introduceți celălalt capăt al tubului în mufa SOFT a pompei electrice. Porniți pompa și așteptați până când perna devine suficient de moale, apoi opriți pompa.
3. Începeți să modelați perna (fie manual pentru a ajusta forma, fie prin așezat sau sprijinire pe aceasta).
4. Schimbați poziția tubului de la SOFT la HARD și porniți pompa pentru a elimina aerul până când se atinge duritatea dorită.
5. Desurubați tubul, puneți capacul la loc și strângeți-l.
6. Pentru a schimba forma, repetați pașii de la 2 la 5.



ÎNTREȚINERE

- Verificați în mod regulat starea produsului – acordați atenție eventualelor

crăpături sau rupturi.

- Înșurubați capacul supapei înainte de spălare.
- Spălați manual perna sub jet de apă, folosind un detergent obișnuit, de exemplu detergent de vase.
- Poate fi spălată în mașina de spălat la un ciclu de 40°C – este suficient balsamul de rufe, nu este necesară folosirea detergentului pudră.
- Ștergeți și uscați cu un prosop de hârtie.
- Pot fi folosite dezinfectantele standard utilizate în spitale.
- Nu folosiți soluții de curățare pe bază de solvenți, cum ar fi toluenul sau acetona.
- Pentru produsele cu Velcro, aspirați regulat suprafața moale pentru a preveni pierderea aderenței.

GARANȚIE

- Garanția este oferită pentru o perioadă de 24 de luni.
- Garanția nu acoperă deteriorările mecanice ale Sistemului de poziționare Confort Plus Duo Velcro Stabilo System.
- În caz de nelămuriri, vă rugăm să contactați direct vânzătorul sau producătorul.
- Raportați orice incident direct vânzătorului sau producătorului.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Dispozitivul medical Sistemului de poziționare Confort Plus Duo Velcro Stabilo System respectă cerințele esențiale ale Directivei 93/42/CEE.



NOEL s.c.
str. Romanowicz, nr. 6, 30-702 Krakow
+ 48 12 341 53 16
www.stabilo.krakow.pl
stabilo@stabilo.krakow.pl



Poduszki Stabilo/Stabilo Cushions



stabilocushions-official



stabilo cushion



Nr. doc. IU/PCDSS 2.1 – PL/EN

Ed. 2 /2019

actuală până 03.05.2021