

CAT I™
Cadru



Manual de utilizare

ATENȚIE!

Producătorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă a dispozitivului numai atunci când produsul a fost achiziționat de la angajatul calificat Akces-MED Ltd. sau de la magazinul medical specializat!

Akces-MED Ltd. își rezervă dreptul de a introduce modificări tehnice și comerciale în conținutul instrucțiunii fără avertisment.



Produsul este un dispozitiv medical din clasa I, conform regulii 1, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale.



Compania Akces-MED Ltd. a introdus sistemul de management al calității ISO 13485 în ceea ce privește producția, vânzările și serviciile.



Cuprins

Introducere	4
1. Scopul manualului de utilizare	5
2. Indicații și contraindicații pentru utilizare	5
3. Caracteristică generală	8
4. Tabel de mărimi	9
5. Cum se utilizează produsul	10
5.1 AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII SUPORTULUI TORACIC	11
5.2 AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII SUPORTULUI PELVIAN	12
5.3 Suporturile toracice și pelviene cu reglare	12
5.4 Tăblie	14
5.5 Ajustarea suporturilor pentru picioare	17
5.6 Ajustarea unghiului de înclinare	18
6. Cum se utilizează cadrul	18
6.1 Pregătirea utilizatorului	18
6.2 Pregătirea produsului	19
6.3 Poziția verticală	20
7. Norme de siguranță	21
8. Condiții de garanție	28
9. Întreținere și curățare	28
10. Etichetare	34

Introducere

Stander CAT ITM a fost creat cu scopul de a ajuta copiii în adoptarea poziției verticale. Poziția verticală contribuie la dobândirea de către copii a unei noi experiențe din mediul cel mai apropiat și stimulează dezvoltarea psiho-fizică a acestora. În plus, reglează procesele fiziologice și oxigenează corpul copilului. Există multe avantaje în timpul utilizării CAT ITM.

Unghi de înclinare reglabil (de la 25° la 85°) chiar și cu un copil în dispozitiv. Sistemul extins de centuri și suporturi îl face pe copil să se simtă în siguranță și în siguranță.

În ceea ce privește acest produs, este fabricat din materiale ecologice și ecologice și este, de asemenea, vopsit manual.



Nu uitați să citiți cu atenție acest manual de utilizare. Veți găsi nu numai informații utile, ci și orientări privind utilizarea sigură și eficientă a produsului.

Dacă aveți întrebări sau observații, nu ezitați să ne contactați:

Consultant în domeniul medical: mobil +48 516 183 883

Akces-MED Ltd.: tel. +48 17 864 04 77

e-mail: export@akces-med.com

ATENȚIE!

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare, care este esențial pentru utilizarea corectă și sigură a produsului.

Amintiți-vă că respectarea liniilor directe este foarte importantă. Asigurați siguranța și prelungiți durabilitatea, precum și estetica produsului.

1. Scopul manualului de utilizare

ATENȚIE!

Prezentul manual de utilizare conține informațiile de bază esențiale pentru: pregătirea înainte de utilizare, folosirea corectă, întreținerea, curățarea și condițiile de garanție.

Manualul de utilizare trebuie păstrat într-un loc ușor accesibil. Acesta este destinat persoanelor care îngrijesc persoane cu dizabilități, precum și medicilor și fizioterapeuților care utilizează produsul.

Înainte de a utiliza cadrul dinamic CAT ITM, utilizatorul este obligat să se familiarizeze cu manualul de utilizare.

2. Indicații și contraindicații pentru utilizare

Cadrele dinamice de stat în picioare sunt destinate persoanelor cu afecțiuni ortopedice, neurologice și cardiologice, precum și persoanelor aflate în perioada postoperatorie, care nu pot adopta și menține poziția verticală pe cont propriu, ca urmare a unei imobilizări prelungite. Acest dispozitiv reprezintă un ajutor de neînlocuit în procesul de reabilitare, atât din punct de vedere funcțional și motric, cât și în ceea ce privește integrarea socială. Este un sprijin valoros în activitățile zilnice, nu doar în timpul exercițiilor de recuperare, ci și în timpul jocului sau al studiului. Alegerea dimensiunii potrivite a dispozitivului se face în funcție de indicațiile medicale și de parametrii anatomici, indiferent de vârsta utilizatorului.

Este recomandat pentru utilizatori în următoarele situații:

- paralizie cerebrală – diverse tipuri și forme;
- leziuni cerebrale și medulare însoțite de paralizie sau slăbiciune a membrelor inferioare, tulburări de echilibru și coordonare motorie de diferite etiologii;
- boli de demielinizare (ex.: scleroză multiplă – sm);
- meningocel;
- boli musculare cu slăbiciune și paralizie (ex.: distrofii musculare,

miastenia gravis, miozită);

- afecțiuni genetice;
- boli degenerative și neurologice;
- alte afecțiuni asociate cu slăbiciunea musculară, paralizia sau tulburările aparatului locomotor;
- după traumatisme craniene, medulare și leziuni ale coloanei vertebrale, însoțite de paralizie sau pareză.

Contraindicații:

În timp ce stă vertical, utilizatorul care se află într-o poziție în picioare ar trebui să fie monitorizat îndeaproape. Tratamentul trebuie întrerupt în cazul unor reacții adverse precum: paloare, transpirație sau leșin, tensiune articulară și deformările rezultate ale corpului. Procedura ulterioară trebuie consultată cu medicul specialist sau cu un fizioterapeut care a prescris tratamentul.

Starea critică a utilizatorului este o contraindicație absolută pentru a sta în picioare.

Contraindicații relative pentru picioare în poziție verticală sunt: hipertensiune arterială în repaus peste 200/110 mmHg, hipertensiune pulmonară, aritmii cardiace, astm instabil, tulburări metabolice instabile, boală moderată a valvei cardiace,

- orice afecțiune, cum ar fi o fractură de vindecare sau osteoporoză severă, care face imposibilă suportarea greutății corporale proprii a utilizatorului;
- fractură osoasă cu uniune incompletă, cu excepția cazului în care este aprobată de un medic;
- restricții postoperatorii privind încărcarea în comun;
- durere în timp ce stați în picioare în cadru (cauzată de subluxarea sau dislocarea articulației șoldului, suprasolicitarea țesuturilor moi sau presiunea excesivă). Subluxarea sau dislocarea articulației șoldului în absența durerii nu este o contraindicație.

Persoanele cu flexie semnificativă în articulațiile șoldului sau genunchiului, precum și cu contracturi în articulația gleznei, pot să nu poată utiliza cadrul în picioare. Asigurați-vă că poziția utilizatorului în cadrul în picioare nu provoacă

presiune excesivă sau întinderea zonelor afectate ale corpului. În astfel de cazuri, statul în picioare poate fi contraindicat până când se obține o gamă mai mare de mișcare în articulațiile contractate.

În cazul persoanelor cu insuficiență cardiovasculară (hipertensiune arterială în repaus peste 200/110 mmHg, hipertensiune pulmonară, aritmii cardiace, boală moderată a valvei cardiace); sistemul respirator (astm instabil) și tulburări metabolice instabile, este necesar să se monitorizeze utilizatorul în timp ce stă în picioare pentru a preveni complicațiile grave.

3. Caracteristică generală



- Suport toracic reglabil cu pernă și centuri de siguranță
- Suport pelvian reglabil cu pernă și centuri de siguranță
- Bloc de abducție
- Placă pentru picioare cu suporturi și centuri
- Tavă cu pernă
- Cadru cu roți pivotante și frâne

- Tăblie cu tavă
- Arc pneumatic



INFORMAȚII

Accesoriile disponibile pot fi găsite pe site-ul **akces-med.com** în secțiunea de produse.

4. Tabel de mărimi




Simbol	Măsurare	UM	Mărime 1
W	înălțimea orientativă a utilizatorului *	[cm]	70 - 100
A	spatierea suportului pelvian	[cm]	12 - 23
A1	spatierea suportului toracic	[cm]	12 - 21
C	înălțimea suportului pelvian	[cm]	38 - 60
C1	înălțimea suportului toracic	[cm]	50 - 72
B / B1	toracic si pelvian sustine	[cm]	12
	lungimea suportului	[cm]	16 (mărime XS), 19 (mărime
	lățimea suportului	[cm]	8
E	unghiul de înclinare	[o]	25 - 85
	greutatea maximă a	[kg]	25
Notă: Intervalul de toleranță la măsurare este de +/- 1 cm / 1/2 in. * Această măsurare nu poate fi parametrul principal atunci când alegeți dimensiunea produsului.			

Greutate și dimensiuni	UM	Mărime 1
lățime	[cm]	54
lungime	[cm]	90 - 115
înălțime	[cm]	64 - 123
greutate	[kg]	18

Notă: Intervalul de toleranță al măsurătorilor este de +/- 1 cm / 1/2 in.

Notă: Valoare aproximativă, în funcție de configurația produsului.

5. Cum se utilizează produsul

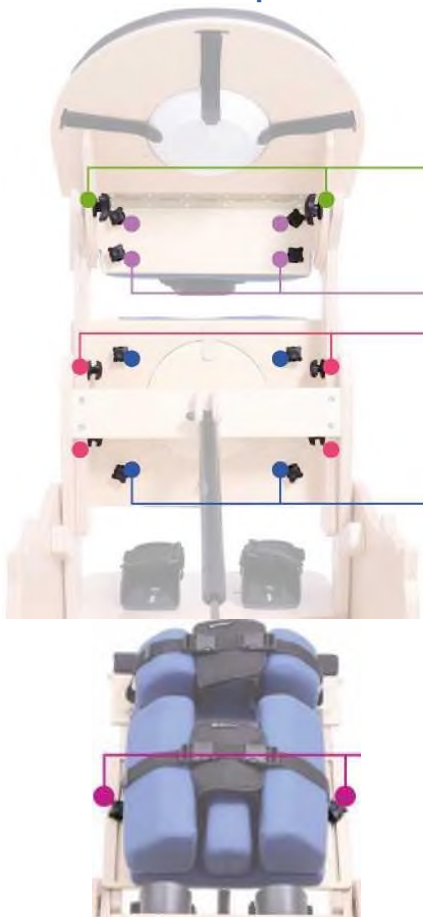

- AJUSTAREA UNGHIULUI DE ÎNCLINARE AL TĂBLIEI

- LĂȚIMEA REGLABILĂ A SUPORTULUI TORACIC

- ÎNĂLȚIMEA REGLABILĂ A SUPORTULUI TORACIC ȘI TĂBLIA (ÎNCORPORATĂ)

- LĂȚIMEA REGLABILĂ A SUPORTULUI PELVIAN

- ÎNĂLȚIMEA REGLABILĂ A SUPORTULUI PELVIAN

- AJUSTAREA SUPORTURILOR PENTRU PICIOARE

5.1 AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII SUPORTULUI TORACIC



INFORMAȚII!

Suportul toracic al dispozitivului este integrat cu tava. Aceasta înseamnă că, la reglarea înălțimii suportului toracic, se modifică și înălțimea tavei. Nu este posibilă ajustarea separată a celor două componente.

ATENȚIE!

Butonii pentru reglarea înălțimii suportului toracic se află pe ambele părți ale produsului.

După finalizarea reglajului, nu uitați să strângeți butonii și, înainte de utilizare, asigurați-vă că componentele reglabile nu își schimbă poziția sub influența forței aplicate.

5.2 AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII SUPORTULUI PELVIAN




Atenție!

Butoanele pentru reglarea înălțimii suportului pelvian sunt situate pe ambele părți ale produsului.

După finalizarea reglării, nu uitați să strângeți butoanele și, înainte de utilizare, asigurați-vă că componentele reglabile nu își schimbă poziția sub influența forței aplicate.



5.3 Suporturile toracice și pelviene cu reglare

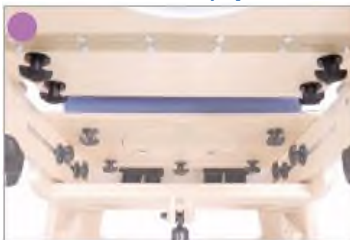





5.4 Tăblie







INFORMAȚII!

Atunci când se folosește un capac complet, bolul poate fi plasat acolo unde se afla anterior capacul complet. Bolul trebuie fixat pentru a preveni căderea acestuia.

5.5 Ajustarea suporturilor pentru picioare



5.6 Ajustarea unghiului de înclinare



6. Cum se utilizează cadrul

ATENȚIE

Înainte de a utiliza cadrul dinamic pentru stat în picioare CAT I™, citiți acest manual de utilizare.

Înainte de fiecare utilizare, pregătiți utilizatorul și dispozitivul!

6.1 Pregătirea utilizatorului

Înainte de utilizarea produsului, este esențial să vă asigurați că:

- Îmbrăcămintea utilizatorului este ușoară și confortabilă; se recomandă haine sport confortabile.
- Încălțăminta trebuie să fie confortabilă și, în plus, să ofere stabilitate gleznei.
- Din motive igienice și pentru a evita abraziunea, este recomandat ca

utilizatorul să poarte întotdeauna haine în timpul utilizării dispozitivului; pielea nu trebuie să fie goală, mai ales în zonele care intră în contact frecvent cu tapițeria.

- Drenuri, pungi, catetere etc., dacă sunt utilizate, trebuie fixate corespunzător pentru a funcționa corect și pentru a nu deranja în timpul utilizării produsului.
- Dacă este necesar, utilizatorul poate purta dispozitive ortopedice (guler, corset, orteză, încălțăminte ortopedică), doar dacă sunt recomandate de medic.

ATENȚIE!

Îmbrăcămintea ar trebui să protejeze pielea utilizatorului de contactul direct cu tapițeria, precum și cu alte părți ale echipamentului.

Numai medicul poate lua o decizie cu privire la utilizarea oricărui tip de aprovizionare ortopedică!

6.2 Pregătirea produsului

Înainte de utilizare, este necesar să:

- asamblați cadrul în picioare, așezați cadrul în picioare pe o suprafață plană și stabilă, departe de surse de foc și temperaturi ridicate;
- asigurați-vă că toate elementele sunt nedeteriorate, montate în mod corespunzător și stabile,
- acționați frânele,
- reglați cadrul în picioare la dimensiunea utilizatorului și nevoile sale,
- montați accesoriile (dacă este cazul);
- plasați utilizatorul în cadrul în picioare,
- fixați elementele care stabilizează utilizatorul;
- începeți verticalizarea.

ATENȚIE!

Înainte de a utiliza cadrul de susținere în picioare, asigurați-vă că toate centurile și celelalte elemente au fost reglate corespunzător și că toate

butoanele și prinderile elementelor reglabile sunt bine strânse.

Echipamentul funcționează corect doar atunci când dispozitivul este ajustat conform măsurătorilor utilizatorului. Amintiți-vă să țineți cont de toate aceste măsurători la achiziționarea produsului.

Ajustarea corectă este cea mai importantă, deoarece doar atunci produsul este sigur. Este interzis să forțați copilul să mențină o anumită poziție, deoarece utilizatorul se va simți inconfortabil, iar acest lucru poate duce la posturi incorecte.

Asigurați-vă că toate centurile și sistemele de blocare sunt corect reglate și fixate. Verificați, de asemenea, dacă prinderile elementelor reglabile sunt bine strânse.

6.3 Poziția verticală

Durata de timp pentru procesul de poziție verticală este diferită pentru fiecare utilizator. Se recomandă prelungirea acestei perioade în timpul perioadei inițiale (perioada de adaptare pentru schimbarea poziției).

Atât medicul, cât și fizioterapeutul pot lua decizii cu privire la durata procesului de poziție verticală. Procesul de poziție verticală trebuie să fie întotdeauna efectuat sub supravegherea unei persoane instruite!

Se recomandă să distrageți atenția utilizatorului în timpul procesului de poziție verticală prin: jocuri de manipulare, jocuri educative, stimulare tactilă și altele.

ATENȚIE!

Este foarte important să ajustați dispozitivul la utilizator înainte de a-l utiliza!

Înainte de a începe procesul de stat în picioare, asigurați-vă că toate suporturile și hamul pelvian au fost reglate și fixate în mod corespunzător și că elementele de fixare ale elementelor reglabile sunt strânse în siguranță.

Este interzis să lăsați utilizatorul nesupravegheat!

Numai personalul instruit poate ajusta cadrul în picioare la utilizator!

În ceea ce privește prima poziție verticală, aceasta are loc în secțiile de reabilitare, neurochirurgie sau ortopedie. În plus, aceasta trebuie efectuată împreună cu medicul și fizioterapeutul, deoarece pot apărea probleme medicale în timpul primelor tratamente, cum ar fi leșinul, scăderea tensiunii arteriale, amețeli etc. Stând în picioare în casă, împreună cu personalul instruit (tehnician de reabilitare, asistentă medicală districtuală, membri ai familiei

instruiți).

7. Norme de siguranță

ATENȚIE!

Cadrul pentru stat în picioare CAT I™ trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare.

Înainte de fiecare utilizare, pregătiți utilizatorul și dispozitivul!

Este foarte important să consultați medicul sau fizioterapeutul pentru a lua o decizie corectă cu privire la alegerea CAT I™ și dimensiunea acestuia. De asemenea, este esențial să vă familiarizați cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.

1. Înainte de utilizare, este necesar să:

- să se asigure că nu există daune sau defecte diferite care ar putea pune în pericol viața utilizatorului;
- verificați dacă toate piesele sunt de lucru și sunt montate corect și, în plus, verificați dacă acestea nu sunt rupte,
- verificați dacă toate șuruburile, butoanele și toate părțile lipite, cusute sau filetate sunt strânse;
- verificați starea tapiteriei pentru orice semne de deteriorare,
- verificați dacă frânele funcționează corect;
- verificați dacă cataramele funcționează corect,
- reglați dispozitivul în funcție de măsurătorile și nevoile utilizatorului, de exemplu, reglarea suporturilor, a hamurilor și a accesoriilor (dacă există),
- asigurați-vă că toate piesele mobile și butoanele pentru reglaje sunt stabile și blocate;
- fixați utilizatorul cu ajutorul dispozitivelor de stabilizare disponibile ale cadrului în picioare. Este foarte important să se asigure pacientul, deoarece îl protejează de cădere.

2. Este interzisă utilizarea cadrului de ridicare în picioare în scopuri diferite de cele pentru care este destinat.

3. Este interzisă utilizarea cadrului de ridicare în picioare dacă este deteriorat sau îi lipsește vreo parte.

4. Este interzis să lăsați utilizatorul nesupravegheat.
5. Dispozitivul trebuie utilizat doar în prezența unei persoane instruite și competente.
6. Este interzis să lăsați cadrul de ridicare în picioare și utilizatorul pe un teren instabil fără supraveghere, chiar dacă frâna este activată.
7. Este interzisă urcarea sau coborârea scârilor, indiferent dacă utilizatorul se află în dispozitiv sau nu.
8. Este important să activați frâna la urcarea și coborârea utilizatorului din cadrul de ridicare în picioare.
9. Asigurați-vă că toate membrele nu sunt aproape de spițele roților sau de alte elemente reglabile.
10. Cadrul de ridicare în picioare trebuie depozitat și utilizat departe de surse de foc sau temperaturi ridicate. În plus, nu trebuie depozitat în camere cu umiditate ridicată.
11. Fixează cadrul de ridicare în picioare în timpul transportului pentru a evita eventuale deteriorări. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele apărute din cauza unei pregătiri necorespunzătoare a dispozitivului pentru transport.
12. Înainte de utilizarea cadrului de ridicare în picioare, îndepărtați toate ambalajele de hârtie și plastic.

ATENȚIE!

Ajustarea incorectă a produsului poate duce la efecte secundare cum ar fi leșinul, deformările corporale, supraîncărcarea articulațiilor etc. Dacă apar simptomele menționate mai sus, opriți imediat utilizarea produsului, scoateți utilizatorul din produs și așezați-le. Dacă simptomele nedorite persistă, contactați imediat un medic. Dacă simptomele au dispărut, informați medicul curant despre acest fapt pentru a lua o decizie cu privire la procesul de reabilitare ulterioară.

Incidentele grave care implică acest dispozitiv trebuie raportate atât producătorului, cât și autorităților competente din țara dumneavoastră.

Dispozitivul conține părți mici pe care copiii le pot înghiți.

Nu utilizați un produs care prezintă semne de deteriorare, distrugere sau uzură. Numai un produs complet funcțional, utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, este sigur pentru utilizator. Dacă produsul este

deteriorat, întrerupeți utilizarea și contactați-ne cu producătorul.

Este interzisă efectuarea oricăror modificări privind structura dispozitivului datorită faptului că acesta este periculos și duce la pierderea garanției.

Greutatea utilizatorului nu trebuie să fie mai mare decât greutatea maximă descrisă la pagina 8, unde veți găsi informații cu privire la această problemă.

8. Condiții de garanție

- Akces-MED Ltd vinde produse fără defecte sau vicii de fabricație.
- Producătorul oferă cumpărătorului o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Toate defectele constatate în perioada de garanție vor fi reparate gratuit.
- Toate defectele care apar după perioada de garanție pot fi reparate doar dacă utilizatorul va plăti pentru acestea. Această regulă nu se aplică produselor returnate – utilizatorul poate solicita rambursarea prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
- Cadrul de ridicare în picioare beneficiază de o garanție de 36 de luni pe teritoriul Canadei – detaliile drepturilor care decurg din garanția extinsă sunt reglementate prin certificatul de garanție.
- Producătorul afirmă că produsul poate fi utilizat timp de 36 de luni. Utilizatorul poate folosi produsul și după această perioadă doar dacă îl va trimite producătorului pentru întreținere. Ulterior, producătorul va stabili din nou durata de utilizare a produsului și, în plus, va determina data următoarei întrețineri.
- Dacă produsul este deteriorat, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau serviciul clienți Akces-MED Ltd: (tel. +48 17 864 04 77, e-mail: export@akces-med.com)

9. Întreținere și curățare

Cadrul CAT I™, care este un dispozitiv medical, trebuie păstrat întotdeauna curat și trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Cadrul pentru stat în picioare trebuie păstrat într-o cameră curată, uscată și ventilată. Întreținerea și curățarea trebuie efectuate cel puțin o dată pe lună. Curățarea și întreținerea periodică a dispozitivului este esențială pentru a menține buna funcționare și siguranța acestuia.

Recomandări pentru curățarea tapițeriei și a altor elemente ale dispozitivului:

1. spălați cu apă caldă folosind o cârpă moale și agenți de curățare ușoară,
2. asigurați-vă că cârpa nu este prea umedă, deoarece acest lucru poate mări pata și poate deteriora tapițeria sau spuma din interiorul tapițeriei;

3. amintiți-vă să eliminați excesul de umiditate din tapițerie înainte de următoarea curățare,
4. tapițeria nu trebuie să se ude în timpul curățării,
5. nu trebuie să înmuiați tapițeria,
6. după curățarea petelor, tapițeria trebuie clătită cu apă caldă și uscată cu o cârpă curată,
7. nu utilizați perii dure pentru curățarea tapițeriei,
8. nu curăță cadrul și tapițeria cu substanțe chimice puternice, de exemplu solvenți sau caustice pe bază de clor;
9. nu curățați, nu înlocuiți niciun element și nu mențineți cadrul în picioare în timpul utilizării;
10. elementele metalice și plastice trebuie curățate manual cu agenți de curățare adecvați, după ce ați citit recomandările producătorului agentului de curățare dat.
11. Este posibilă dezinfectarea elementelor metalice, din plastic, lemn și tapițerie ale produsului cu un dezinfectant disponibil pe scară largă. Pentru a dezinfecta un element, pulverizați suprafața acestuia cu un dezinfectant disponibil pe piață și ștergeți cu o cârpă curată și uscată. După dezinfectare, așteptați până când elementul este complet uscat, în special în cazul tapițeriei. Înainte de a folosi dezinfectantul, verificați mai întâi într-un loc ascuns dacă produsul nu se va decolora sau deteriora.

ATENȚIE!

Țineți minte că tapițeria trebuie să fie întotdeauna uscată înainte de utilizare!

Producătorul cadrului de ridicare în picioare, Akces-MED SRL, nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de utilizarea produselor de curățare necorespunzătoare.

Înainte de utilizare, este necesar să:

- să se curețe roțile,
- să se verifice dacă roțile sunt montate corect, să se verifice dacă frâna oprește roata de întoarcere;
- se verifică dacă structura cadrului în picioare nu prezintă rupturi sau alte tipuri de deformări;
- se verifică dacă toate piesele mobile funcționează și dacă toate

șuruburile, piulițele, butoanele etc. sunt strânse corect;

- se verifică dacă centurile nu sunt rupte; verificați dacă cataramele și clemele funcționează corect.

ATENȚIE!

Producătorul își asumă responsabilitatea numai pentru defecțiunile sau daunele ascunse care au apărut în ciuda faptului că utilizatorul a respectat liniile directoare.

În caz de daune, este esențial să contactați persoana care v-a vândut produsul.



INSPECȚIA TEHNICĂ

Inspecțiile tehnice ar trebui efectuate în mod regulat. Înainte de întreținere, produsul trebuie curățat temeinic pentru a dezvălui orice deteriorare ascunsă.

Frecvență	Ce ar trebui verificat?	Ce ar trebui făcut
RĂSPUNSURI		

ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE

Starea generală a produsului.

Verificați:

- întregul produs pentru orice deteriorare vizibilă, fisuri sau defecte mecanice,
- dacă produsul este complet,
- dacă toate șuruburile, butoanele, piulițele și alte elemente ale construcției sunt complete și strânse.

Roți și frâne.

Verificați:

- dacă roțile sunt montate corespunzător și dacă nu sunt deteriorate,
- dacă frâna blochează roata care se rotește,
- dacă roțile nu sunt murdare. Dacă este necesar, curățați roțile.

Fixarea elementelor de construcție.

Verificați toate mecanismele produsului și piesele sale în mișcare. Verificați în special:

- dacă produsul este montat corespunzător,
- dacă roțile sunt montate corespunzător,
- dacă elementele care fixează utilizatorul sunt montate corespunzător și dacă funcționează bine,
- dacă toate părțile mobile sunt complete,
- dacă toate piesele mobile funcționează corect, nu blocați;
- dacă mecanismele de ajustare ale următoarelor elemente funcționează în mod corespunzător (dacă este cazul).

Elemente de tapițerie.

Verificați:

- dacă există deteriorări, rupturi, cusături libere sau deformări ale elementelor de tapițerie,

- dacă hamurile și curelele pelviene nu sunt rupte sau răsucite și dacă cataramele funcționează corect,
- dacă hamul pelvian nu se desface sub presiune sau când este tras.

În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau Producătorul.

O dată pe săptămână

Curățarea produselor.

Dacă cadrul și tapițeria se murdăresc (praf, noroi etc.) în timpul utilizării de zi cu zi, ștergeți-le cu o cârpă umedă fără detergenți. Îndepărtați murdăria (de exemplu, părul, resturile alimentare etc.) din părțile mobile ale produsului.

Produsul trebuie curățat atunci când este necesar, dar cel puțin o dată pe săptămână. Nu utilizați detergenți pe bază de clor sau alcool metilic.

Înainte de a utiliza produsul, verificați dacă tapițeria este uscată.

O dată pe lună

Osiile roților, conectorii rapizi (dacă este cazul).

Verificați:

- dacă roțile se rostogolesc și dacă nu sunt slăbite. Pentru a menține roțile, aplicați o cantitate mică de conservant-lubrifiant între ax și butucul roții. Verificați dacă puteți îndepărta și atașa cu ușurință roțile. Curățați roțile atunci când sunt murdare.

Conectori pentru construcția produselor (sudură, filetare, lipire).

Verificați:

- starea cadrului produsului în locurile de îmbinare (suduri, fire, lipire).
- Anvelope/innertubes (dacă este cazul).

Verificați:

- Starea de uzură a anvelopei. Verificați dacă există deteriorări vizibile. Verificați presiunea în pneuri (dacă este cazul). Dacă presiunea în anvelope este prea mică, umflați-le la nivelul corect.

În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau Producătorul.

O dată la 6 luni

Construcția pieselor mobile.

Verificați:

- dacă părțile mobile ale construcției nu au fost deteriorate. Mențineți-le folosind un agent de curățare adecvat.

Etichetarea produsului.

Verificați:

- dacă marcajul și etichetele sunt lizibile.

În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau Producătorul.

DUPĂ VIAȚA FINANȚĂRII PRODUSULUI

Verificarea detaliată a produsului.

Producătorul specifică durata de viață a produsului, care este dată în manualul de utilizare. După perioada dată, utilizatorul poate utiliza produsul numai dacă acesta este trimis înapoi producătorului pentru a fi verificat mai întâi. După aceea, producătorul va redefini durata de viață a produsului și data următoarei verificări.

10. Etichetare

	Declarație că produsul îndeplinește cerințele esențiale		Uscați vertical
	Nr. serie		Nu folosiți clor
	Vă rugăm, citiți manualul de utilizare înainte de utilizare		Nu călcați
	Atenție		Nu folosiți curățare chimică
	Producător		Nu folosiți înălțător
	Data de fabricație		Conținut delicat, fragil
	Produsul nu conține latex		Este interzis atât să urci, cât și să cobori scările. Nu contează dacă utilizatorul este plasat în dispozitiv sau nu
	A se depozita în loc uscat		Este interzis să lăsați utilizatorul nesupravegheat în timpul utilizării produsului.
	A se proteja de lumina soarelui		Este interzisă utilizarea fără centurile de siguranță fixate
	A se depozita în intervalul de temperatură		Trebuie să citiți informațiile suplimentare
	Produs medical		Trebuie să citiți informațiile suplimentare
	Identificatorul unic al dispozitivului		Trebuie să folosiți instrumentele din kit-ul de montare

Plăcuța cu date despre produs

	DENUMIREA PRODUSULUI	PL	DENUMIREA PRODUSULUI	EN
COD QR CU LINK către Website-ul produsului				COD DE BARE
ADRESA PRODUCATORULUI	Akces-MED Sp. z o.o. Jasionka 955 B 36-002 JASIONKA POLAND	JORDI 2 Fotelik ortopedyczno-rehabilitacyjny ze stabilizacją pleców i głowy JORDI 2 POSITIONING CHAIR	MAX LOAD 65 kg 08 2022 MD	ETICHETARE vezi greutatea max admisă pentru acest produs
	FABRICAT LA DATA DE			
NR. SERIE				NR. SERIE ȘI CODUL DE BARE
	SN JRI 007/P/2/BB			

Producător



Akces-MED Ltd.

Jasionka 955 B

36-002 Jasionka

tel. +48 17 864 04 7

e-mail: export@akces-med.com

BDO: 000031619

© Sławomir Wroński 2025