




**OTTER SCAUN DE BAIE
OT 1000, OT 2000, OT 3000**

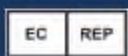

**Reprezentant Autorizat UE
Drive Medical LTD**

Ainley's Industrial Estate

Eiland, West Yorkshire,

United Kingdom HX5 9JP

www.inspiredbydrive.com

Utilizare recomandată

Scaunul de baie Otter oferă suport în timpul băii în cadă. Scaunul, spătarul și picioarele sunt complet reglabile. Toate ajustările se fac fără unelte.

Asamblare

Scaunul de baie Otter vine într-o singură cutie, complet asamblat. Această cutie conține: scaun de baie, chingă pentru pernă pentru cap, chingi de poziționare și chingi pentru picioare.

Dacă livrarea dumneavoastră este incompletă, vă rugăm să contactați un dealer autorizat Inspired by Drive.

Accesorii opționale:

Suport pentru cadă: Cod produs OT 8010

Suport pentru duș: Cod produs OT 8020

Kit material moale pentru OT 1000: Cod produs OT 1002

Kit material moale pentru OT 2000: Cod produs OT 2002

Kit material moale pentru OT 3000: Cod produs OT 3002

Întreținere și îngrijire

1. Inspectați periodic scaunul pentru crăpături, fisuri, piese slăbite sau lipsă sau pentru eventuale defecțiuni. Verificați materialul textil pentru rupturi sau zone uzate.

Dacă produsul necesită service sau piese de schimb, contactați un dealer autorizat Inspired by Drive.

2. Spălați scaunul și materialul textil cu apă și săpun sau cu soluție de înălbitor 10%. Nu folosiți detergenți pe bază de ulei de pin. Materialul textil și chingile pot fi îndepărtate și spălate la mașina de spălat. Înainte de spălare, fixați elementele cu scai (hook and loop). Husa textilă poate fi spălată la program rece și uscată prin scurgere. Chingile pot fi spălate în apă caldă și uscate la program rece. Nu călcați.

Atenție

Supravegherea unui adult este necesară în permanență. Chingile și suporturile trebuie ajustate cu atenție pentru confortul și siguranța copilului. Copilul trebuie să fie întotdeauna fixat cu chingile.

Ajustări

Vezi Figura 1

1. Înălțimea curelei pernei pentru cap poate fi reglată prin deschiderea curelei din spate și poziționarea acesteia la înălțimea dorită. Atașați ferm cârligul și

partea cu scai a curelei după ce ați poziționat-o. Glisați pernele pentru cap (A) de-a lungul curelei pentru a regla lățimea.

2. Curelele (D) pot fi reglate după necesitate prin introducerea lor în oricare dintre buclele de pe întreaga unitate.
3. Pentru a regla picioarele (E), trageți bara transversală (F) în exterior, rotiți picioarele și împingeți-le pentru a se fixa.
4. Pentru a regla unghiul scaunului, trageți de Uni-Bar de sub scaun (Fig. 2), rotiți scaunul la poziția dorită și eliberați Uni-Bar. Pentru a regla unghiul spătarului, folosiți Uni-Bar din spatele spătarului Otter (Fig. 3).



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Garanție limitată de 1 an

Produsul dvs. marca Drive beneficiază de garanție împotriva defectelor de materiale și de fabricație pentru o perioadă de 1 an de la data achiziției, valabilă pentru cumpărătorul inițial.

Acest dispozitiv a fost construit conform unor standarde stricte și a fost inspectat cu atenție înainte de expediere. Această garanție limitată de 1 an reflectă încrederea noastră în calitatea materialelor și a execuției produselor noastre și reprezintă asigurarea către consumator că

dispozitivul va oferi ani de funcționare fiabilă.

Garanția nu acoperă defecțiunile dispozitivului cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijența proprietarului, precum și uzura normală. De asemenea, garanția nu se extinde la componentele care se uzează în mod natural, cum ar fi accesoriile din cauciuc, roțile și mânerele, care necesită înlocuire periodică.

Dacă aveți întrebări despre dispozitivul Drive sau despre această garanție, vă rugăm să contactați un dealer autorizat Drive.

© 2017 Medical Depot, Inc. Toate drepturile rezervate.

Drive DeVilbiss Healthcare


99 Seaview Boulevard, Port Washington, N.Y. 11050,
SUA

Fabricat în China





OTTER SCAUN DE BAIE cu TAPIȚERIE MOALE
OT 1000 SF, OT 2000 SF, OT 3000 SF

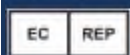

Reprezentant Autorizat UE

Drive Medical LTD

Ainley's Industrial Estate

Eiland, West Yorkshire,

United Kingdom HX5 9JP

www.inspiredbydrive.com

Utilizare recomandată

Scaunul de baie Otter oferă suport în timpul băii în cadă. Scaunul, spătarul și picioarele sunt complet reglabile. Toate ajustările se fac fără unelte.

Asamblare

Scaunul de baie Otter vine într-o singură cutie, complet asamblat. Această cutie conține: scaun de baie, chingă pentru pernă pentru cap, chingi de poziționare și chingi pentru picioare.

Dacă livrarea dumneavoastră este incompletă, vă rugăm să contactați un dealer autorizat Inspired by Drive.

Accesorii opționale:

Suport pentru cadă: Cod produs OT 8010

Suport pentru duș: Cod produs OT 8020

Întreținere și îngrijire

1. Inspectați periodic scaunul pentru crăpături, fisuri, piese slăbite sau lipsă sau pentru eventuale defecțiuni. Verificați materialul textil pentru rupturi sau zone uzate. Dacă produsul necesită service sau piese de schimb, contactați un dealer autorizat Inspired by Drive.

2. Spălați scaunul și materialul textil cu apă și săpun sau cu soluție de înălbitor 10%. Nu folosiți detergenți pe bază de ulei de pin. Materialul textil și chingile pot fi îndepărtate și spălate la mașina de spălat. Înainte de spălare, fixați elementele cu scai (hook and loop). Husa textilă poate fi spălată la program rece și uscată prin scurgere. Chingile pot fi spălate în apă caldă și uscate la program rece. Nu călcați.

Atenție

Supravegherea unui adult este necesară în permanență. Chingile și suporturile trebuie ajustate cu atenție pentru confortul și siguranța copilului. Copilul trebuie să fie întotdeauna fixat cu chingile.

Ajustări

Vezi Figura 1

1. Înălțimea curelei pernei pentru cap poate fi reglată prin deschiderea curelei din spate și poziționarea acesteia la înălțimea dorită. Atașați ferm cârligul și partea cu scai a curelei după ce ați poziționat-o. Glisați pernele pentru cap (A) de-a lungul curelei

pentru a regla lăţimea.

2. Curelele (D) pot fi reglate după necesitate prin introducerea lor în oricare dintre buclele de pe întreaga unitate.
3. Pentru a regla picioarele (E), trageţi bara transversală (F) în exterior, rotiţi picioarele şi împingeţi-le pentru a se fixa.
4. Pentru a regla unghiul scaunului, trageţi de Uni-Bar de sub scaun (Fig. 2), rotiţi scaunul la poziţia dorită şi eliberaţi Uni-Bar. Pentru a regla unghiul spătarului, folosiţi Uni-Bar din spatele spătarului Otter (Fig. 3).



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Garanție limitată de 1 an

Produsul dvs. marca Drive beneficiază de garanție împotriva defectelor de materiale și de fabricație pentru o perioadă de 1 an de la data achiziției, valabilă pentru cumpărătorul inițial.

Acest dispozitiv a fost construit conform unor standarde stricte și a fost inspectat cu atenție înainte de expediere. Această garanție limitată de 1 an reflectă încrederea noastră în calitatea materialelor și a execuției produselor noastre și reprezintă asigurarea către consumator că dispozitivul va oferi ani de funcționare fiabilă.

Garanția nu acoperă defecțiunile dispozitivului cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijența proprietarului, precum și uzura normală. De asemenea, garanția nu se extinde la componentele care se uzează în mod natural, cum ar fi accesoriile din cauciuc, roțile și mânerele, care necesită înlocuire periodică.

Dacă aveți întrebări despre dispozitivul Drive sau despre această garanție, vă rugăm să contactați un dealer autorizat Drive.

© 2017 Medical Depot, Inc. Toate drepturile rezervate.

Drive DeVilbiss Healthcare

99 Seaview Boulevard, Port Washington, N.Y. 11050,
SUA

Fabricat în China

