

SMART Pro[™]
Cadru de stat în picioare



ATENȚIE!

Producătorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă a dispozitivului numai atunci când produsul a fost achiziționat de la angajatul calificat Akces-MED Ltd. sau de la magazinul medical specializat!

Akces-MED Ltd. își rezervă dreptul de a introduce modificări tehnice și comerciale în conținutul instrucțiunii fără avertisment.



Produsul este un dispozitiv medical din clasa I, conform regulii 1, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale. Compania Akces-MED Ltd. a introdus sistemul de management al calității ISO 13485 în ceea ce privește producția, vânzările și serviciile.



Cuprins

Introducere	4
1. Scopul manualului de utilizare	5
2. Indicații și contraindicații pentru utilizare	5
3. Caracteristica generală a cadrului pentru stat în picioare	7
4. Tabel de mărimi	8
5. Descrierea modului de asamblare a cadrului de stat în picioare	9
6. Descrierea modului de utilizare a cadrului pentru stat în picioare.....	16
6.1 Centura toracică și pelviană	16
6.2 Centura pelviană.....	17
6.3 Suporturi pentru genunchi.....	18
6.4 Suporturi pentru picioare	20
6.5 Cadru cu roți și frâne independente	20
7. Utilizarea cadrului pentru stat în picioare	20
7.1 Pregătirea utilizatorului	21
7.2 Pregătirea cadrului pentru stat în picioare	21
7.3 Poziția verticală	22
8. Reguli de siguranță	23
9. Termeni de garanție	25
10. Întreținere și curățare	26
11. ETICHETARE.....	33
INFORMAȚII SUPLIMENTARE.....	34

Introducere

SMART PRO™ este un cadru modern care permite utilizatorului să adopte o poziție verticală, este ușor de utilizat, extrem de durabil și stabil. Prin utilizarea ajustării inovatoare, netede și fără trepte, am redus numărul variațiilor de dimensiune de la 8 la 5, menținând în același timp întreaga gamă de ajustări, sporind în același timp confortul și capacitatea cadrului de a se adapta utilizatorului. SMART PRO™ crește odată cu utilizatorul.

Cadrul static SMART PRO™ oferă utilizatorului nu numai un sentiment de siguranță, ci și libertatea de mișcare în membrele superioare, încurajând activitatea și depășirea independentă a limitărilor de mobilitate care rezultă din leziuni sau boli.

În plus, reglarea suporturilor genunchilor și a înălțimii cadrului în picioare se face acum într-un mod neted și fără trepte, permițând adaptarea rapidă a suportului la nevoile individuale ale utilizatorului. Sistemul inovator UPRIGHT PRO™ constă dintr-o centură toracică și pelviană, oferind posibilități largi de reglare. Curelele Velcro puternice utilizate în curele garantează stabilitate, siguranță și reglare ușoară și rapidă. Centura de sold are un design inteligent, permițând un control mai bun asupra rotației pelviene și corectarea poziției utilizatorului în planul frontal prin deplasarea pelviană laterală netedă (spre dreapta sau spre stânga), în funcție de nevoile individuale.

Cele 4 roți pivotante mici integrate cu frâne permit deplasarea ușoară a utilizatorului, îmbunătățind și mai mult funcționalitatea cadrului staționar SMART PRO™.

Nu uitați să citiți cu atenție acest manual de utilizare. Veți găsi nu numai informații utile, ci și orientări privind utilizarea sigură și eficientă a produsului.

Dacă aveți întrebări sau observații, nu ezitați să ne contactați:

Consultant în domeniul medical: mobil +48 516 183 883

Akces-MED Ltd.: tel. +48 17 864 04 77

e-mail: export@akces-med.com

ATENȚIE!

Înainte de a utiliza cadrul-ul, citiți acest manual de utilizare, care este esențial pentru utilizarea corectă și sigură a cadrul-ului.

Amintiți-vă că respectarea liniilor directoare este foarte importantă. Asigurați siguranța și extinde durabilitatea, precum și estetica dispozitivului.

1. Scopul manualului de utilizare

ATENȚIE!

Prezentul manual de utilizare conține informații de bază care sunt esențiale pentru: pregătirea înainte de utilizare, utilizarea corectă, întreținerea, curățarea și condițiile de garanție.

Manualul de utilizare trebuie păstrat într-un loc ușor accesibil. Este conceput pentru persoanele care au grijă de persoanele cu handicap și atât pentru medici, cât și pentru fizioterapeuți care operează dispozitivul.

Înainte de a utiliza SMART ProTM, cadru în picioare, utilizatorul este obligat să se familiarizeze cu manualul de utilizare.

2. Indicații și contraindicații pentru utilizare

Cadrela în picioare sunt destinate persoanelor cu afecțiuni ortopedice, neurologice și cardiologice și persoanelor după intervenția chirurgicală care nu sunt în măsură să adopte și să mențină o poziție în picioare pe cont propriu ca urmare a imobilizării prelungite. Dispozitivul este un ajutor de neînlocuit în procesul de reabilitare, atât în ceea ce privește mișcarea, cât și integrarea socială. Este de mare ajutor în activitățile de zi cu zi, cum ar fi reabilitarea, dar și în timpul jocului sau al studiului. Alegerea dimensiunii adecvate a dispozitivului depinde de indicațiile medicale și de parametrii anatomici, indiferent de vârsta utilizatorului.

Se recomandă utilizatorilor în următoarele cazuri:

- paralizie cerebrală – diferite tipuri și forme,
- leziuni ale creierului și măduvei spinării cu paralizie și slăbiciune a membrelor inferioare, tulburări de echilibru și de coordonare motorie de diverse etiologii,

- boli de demielinizare (de exemplu, scleroza multiplă – SM),
- meningocel,
- boli musculare cu slăbiciune și paralizie (distrofie, miastenia gravis, miozită),
- afecțiuni genetice,
- boli degenerative și neurologice,
- alte afecțiuni asociate cu slăbiciune musculară, paralizie și tulburări ale sistemului musculoscheletic,
- după traumatisme craniene și ale măduvei spinării, precum și leziuni vertebrale cu paralizie și pareză.

Contraindicații:

În timp ce stați în picioare, utilizatorul care se află într-o poziție în picioare ar trebui să fie monitorizat îndeaproape. Tratamentul trebuie întrerupt în cazul unor reacții adverse precum: paloare, transpirație sau leșin, tulpină articulară și deformările rezultate ale corpului. Procedura ulterioară trebuie consultată cu medicul specialist sau cu un fizioterapeut care a prescris tratamentul. Starea critică a utilizatorului este o contraindicație absolută pentru a sta în picioare.

Contraindicații relative pentru picioare în poziție verticală sunt: hipertensiune arterială în repaus peste 200/110 mmHg, hipertensiune pulmonară, aritmii cardiace, astm instabil, tulburări metabolice instabile, boală moderată a valvei cardiace.

- Orice afecțiune, cum ar fi o fractură în curs de vindecare sau osteoporoza severă, care face imposibilă susținerea greutății proprii a utilizatorului.
- Fractură osoasă cu consolidare incompletă, cu excepția cazului în care utilizarea este aprobată de medic.
- Restricții postoperatorii privind încărcarea articulațiilor.
- Durere în timpul poziției în cadrul pentru stat în picioare (provocată de subluxația sau dislocarea articulației șoldului, întinderea excesivă a țesuturilor moi sau presiunea prea mare). Subluxația sau dislocarea articulației șoldului, în absența durerii, nu reprezintă o contraindicație.

Persoanele cu flexie semnificativă în articulațiile șoldului sau genunchiului, precum și cu contracturi în articulația gleznei, pot să nu poată utiliza cadrul în picioare. Asigurați-vă că poziția utilizatorului în cadrul în picioare nu provoacă presiune excesivă sau întinderea zonelor afectate ale corpului. În astfel de cazuri, statul în picioare poate fi contraindicat până când se obține o gamă mai mare de mișcare în articulațiile contractate.

În cazul persoanelor cu insuficiență cardiovasculară (hipertensiune arterială în

repaus peste 200/110 mmHg, hipertensiune pulmonară, aritmii cardiace, boală moderată a valvei cardiace); sistemul respirator (astm instabil) și tulburări metabolice instabile, este necesar să se monitorizeze utilizatorul în timp ce stă în picioare pentru a preveni complicațiile grave.


3. Caracteristica generală a cadrului pentru stat în picioare





Centură toracică PROTM cu pernuțe de îngustare a circumferinței

4. Tabel de mărimi

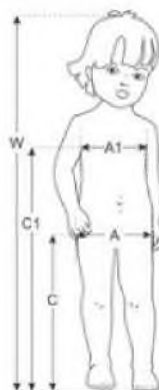

Simb	Măsurare	UM	Mărime	Mărime	Mărime	Mărime	Mărime
W	înălțimea orientativă a	[cm]	50 - 70	70 - 100	90 - 130	110 -	140 -
A	lățimea suportului	[cm]	22	28	37	44	44
C	înălțimea suportului	[cm]	18 - 44	24 - 68	28 - 86	30 - 107	33 -
A1	lățimea suportului	[cm]	20	20 - 26	26 - 35	35 - 42	42
C1	înălțimea suportului	[cm]	41 - 56	56 - 76	71 - 98	86 - 121	106 -
	perimetrul de sprijin	[cm]	49 - 61	61 - 80	80 - 105	101 -	101 -
	perimetrul suportului	[cm]	50 - 64	64 - 76	80 - 105	95 - 125	95 -
G	genunchiul susține	[cm]	8 - 10,5	11 - 14	14 - 20	16,5 - 25	16,5 -
H	genuchi susține	[cm]	11 - 35	12 - 57	14 - 78	14 - 96	14 - 98
K	lungimea subsolului ***	[cm]	16	19	23	26	30
	greutatea maximă a utilizatorului	[kg]	35	55	75	95	95

Greutate și dimensiuni	UM	Mărime	Mărime	Mărime	Mărime	Mărime
lățime	[cm]	50	60	70	78	78
lungime	[cm]	63	70	87	91	91
înălțime	[cm]	55	70	75	92	110
greutate	[kg]	10	12	20	25	26

Notă: Intervalul de toleranță la măsurare este de +/- 1 cm / 1/2 in.

* Această măsurare nu poate fi parametrul principal atunci când alegeți dimensiunea produsului.

** * Înălțimea genunchiului depinde de înălțimea tăbliei.

*** Există 5 dimensiuni de suporturi pentru picioare disponibile. Ca standard, produsul este echipat cu suporturi pentru picioare în funcție de dimensiune:

dimensiunea 1 – suporturi pentru picioare de dimensiuni XS (alte tipuri de picioare - a se vedea pagina 29 pentru detalii);

dimensiunea 2 - dimensiunea 1 suporturi pentru picioare,

dimensiunea 3 - dimensiunea 2 suporturi pentru picioare,

dimensiunea 4 - dimensiunea 3 suporturi pentru picioare,

dimensiunea 5 - dimensiunea suporturi pentru picioare

Posibilitatea de a modifica dimensiunea atunci când plasați o comandă - cereți detalii departamentului de vânzări sau verificați tabelul de la pagina 29 a manualului sau pe akces-med.com în fila produsului.



	S1	S2
1	7.5	9.5
2	8.5	10
3	9	12
4	11	14.5

5. Descrierea modului de asamblare a cadrului de stat în picioare


ASAMBLAREA CADRULUI PENTRU STAT ÎN PICIOARE – MĂRIMEA 1,2

PASUL 1: Scoateți șuruburile cu șaibe din coloane (pic. 1).


PASUL 2: Introduceți coloane în orificiile cadrului, astfel încât măsura să fie plasată spre exteriorul dispozitivului (pic.2).

Există autocolante galbene pe platformă și coloane care indică părțile din dreapta și din stânga. Când asamblați produsul, asigurați-vă că autocolantele de pe platformă și coloane indică aceeași parte.

STÂNGA	DREAPTA
--------	---------

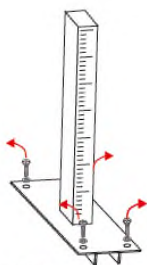

PIC. 1

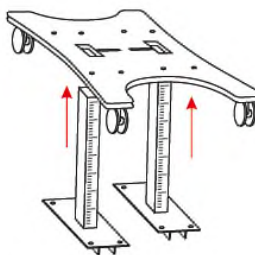


PIC. 2

PASUL 3: Instalați suporturile pentru picioare pe platformă (fig. 3).


PASUL 4: Fixați stâlpii de cadru cu ajutorul șuruburilor (fig. 4).

PASUL 5: Strângeți toate șuruburile cu ajutorul cheii imbus (fig. 5).

Este important ca șuruburile să fie poziționate vertical și strânse uniform!

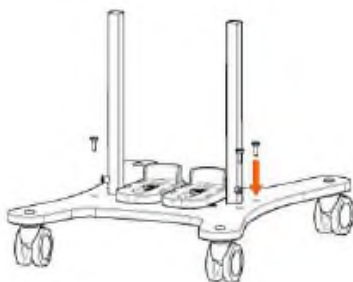

PIC. 4

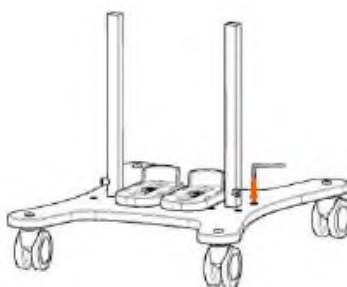

PIC. 5


PASUL 6: Așezați partea superioară a cadrului pentru stat în picioare, cu centurile, măsura și suportul pentru genunchi, pe cadrul cu stâlpi (fig. 6).

PASUL 7: Reglați înălțimea după preferință și strângeți șuruburile de pe stâlpi

cu ajutorul cheii imbus (fig. 7). Stâlpii trebuie să fie la aceeași înălțime!



PIC. 6

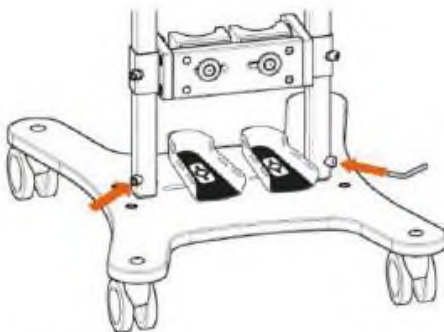

PIC. 7

Pe platformă și tăblie, puteți găsi autocolante galbene care arată partea din față a cadrului în picioare. Pentru a asambla produsul în mod corespunzător, săgețile de pe autocolante ar trebui să indice aceeași direcție. După asamblarea cu succes a cadrului în picioare, autocolante pot fi îndepărtate.



PASUL 8: Cadrul pentru stat în picioare este echipat cu tăblie. Pentru a desface tăblia este necesar să:

- slăbiți patru dispozitive de fixare din tăblie care sunt plasate pe ambele părți cu ajutorul cheii imbus;
- Apoi, desfaceți partea superioară a tăbliei și blocați-o apăsând partea superioară și strângeți elementele de fixare ale tăblie




ASAMBLAREA CADRULUI PENTRU STAT ÎN PICIOARE – MĂRIMEA 3,4,5

PASUL 1: Introduceți cadru transversal în profile pentru cadru - pic. 8,9




PIC. 8

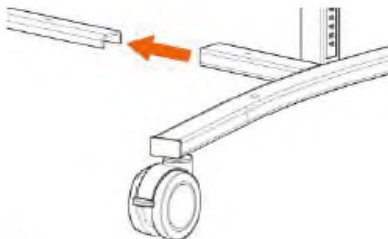


PIC. 9

PASUL 2: Așezați placa pentru picioare pe stâlpii cadrului cu roți (fig. 10).

PASUL 3: Introduceți șuruburile cu șaibe în platformă – patru șuruburi în colțurile bazei și două sub suporturile pentru picioare (fig. 11). Strângeți toate șuruburile cu cheia imbus. Este important ca șuruburile să fie poziționate vertical și strânse uniform!

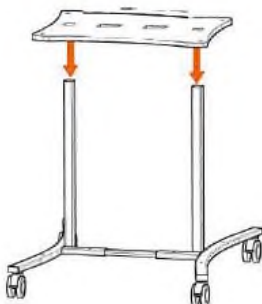

PIC. 10

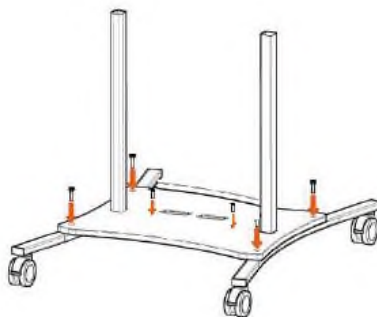


PIC. 11

PASUL 4: Instalați subsolurile pe platformă - pic.12.




PIC. 12

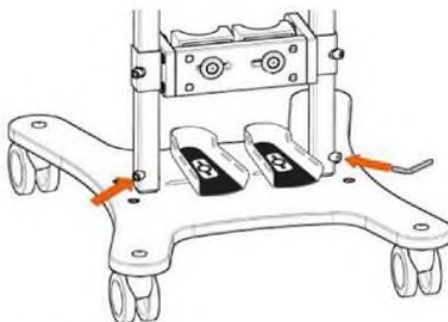

PIC. 13

PASUL 5: Așezați partea superioară a cadrului pentru stat în picioare, cu centurile, măsuța și suportul pentru genunchi, pe cadrul cu stâlpi (fig. 13).

PASUL 6: Reglați înălțimea după preferință și strângeți șuruburile de pe stâlpi cu ajutorul cheii imbus (fig. 14). Stâlpii trebuie să fie la aceeași înălțime!

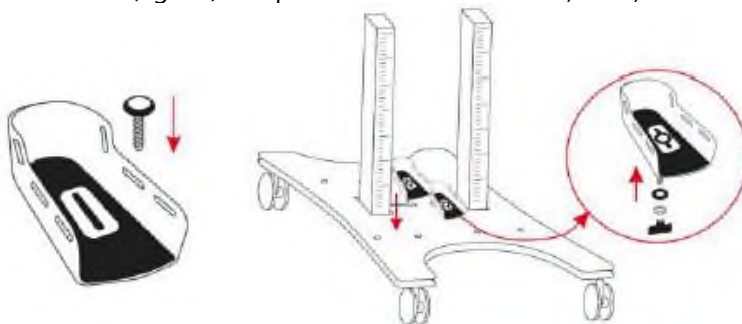

PIC. 14

Pe platformă și pe măsuță se află autocolante galbene care indică partea frontală a cadrului pentru stat în picioare. Pentru a asambla corect produsul, săgețile de pe autocolante trebuie să fie orientate în aceeași direcție. După asamblarea completă a cadrului pentru stat în picioare, autocolantele pot fi



îndepărtate.


PASUL 7: Cadrul pentru stat în picioare este prevăzut cu o tăblie. Pentru a o desface, este necesar să:

- slăbiți cele patru prinderi ale tăbliei, situate pe ambele părți, cu ajutorul cheii imbus;
- apoi desfaceți partea superioară a tăbliei și blocați-o prin apăsarea acestuia și strângerea prinderilor măsuței.



6. Descrierea modului de utilizare a cadrului pentru stat în picioare

6.1 Centura toracică și pelviană

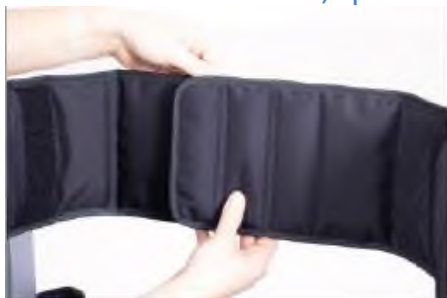

INFORMAȚII

Centura are posibilitatea de reglare a circumferinței pentru utilizatorii cu o conformație corporală mai mare.

Pentru utilizatorii cu o circumferință mai mică pot fi folosite pernuțe de îngustare.



6.2 Centura pelviană





INFORMAȚII

Centura permite reglarea circumferinței pentru utilizatorii cu o conformație corporală mai mare.

6.3 Suporturi pentru genunchi





6.4 Suporturi pentru picioare



6.5 Cadru cu roți și frâne independente



7. Utilizarea cadrului pentru stat în picioare

ATENȚIE

Înainte de utilizarea produsului, utilizatorul trebuie să citească și să se

familiarizeze cu manualul de utilizare.

Nu uitați să pregătiți atât produsul, cât și utilizatorul înainte de utilizarea dispozitivului.

7.1 Pregătirea utilizatorului

Înainte de utilizarea produsului, este esențial să vă asigurați că:

- Îmbrăcămintea utilizatorului este ușoară și confortabilă; se recomandă haine sportive;
- Încălțăminte este confortabilă și stabilizează glezna;
- Din motive de igienă și pentru a evita abraziunea, utilizatorul trebuie să poarte mereu haine atunci când folosește dispozitivul; pielea nu trebuie să fie expusă, mai ales în zonele de contact regulat cu tapițeria;
- Catetere, saci de drenaj, etc., dacă sunt folosite, trebuie fixate corespunzător, pentru a funcționa corect și a nu deranja în timpul utilizării produsului;
- Dacă este necesar, utilizatorul poate purta dispozitive ortopedice (guler, corset, orteze, încălțăminte ortopedică) recomandate de medic.

ATENȚIE!

Îmbrăcămintea trebuie să protejeze pielea utilizatorului de contactul direct cu tapițeria și alte părți ale echipamentului.

Doar medicul poate decide utilizarea oricărui dispozitiv ortopedic.

7.2 Pregătirea cadrului pentru stat în picioare

1. Pași pentru pregătirea cadrului pentru stat în picioare:

- Asamblați cadrul pentru stat în picioare.
- Plasați cadrul pe o suprafață plană și stabilă, departe de surse de căldură sau foc.
- Verificați ca toate elementele să fie neafectate, montate corect și stabile.
- Blocați frânele.
- Ajustați cadrul pentru stat în picioare în funcție de dimensiunile și nevoile utilizatorului.

- Plasați utilizatorul în cadrul pentru stat în picioare.
- Fixați elementele care stabilizează utilizatorul: centuri pentru picioare, suporturi pentru genunchi, suporturi pentru trunchi și pelvis (dacă există).
- Începeți procesul de verticalizare.

ATENȚIE!

Înainte de utilizarea cadrului, asigurați-vă că toate centurile și elementele de prindere sunt ajustate corespunzător și că toate butoanele și mecanismele de fixare sunt bine strânse.

Dispozitivul funcționează corect doar atunci când este ajustat conform măsurătorilor utilizatorului. Corectitudinea ajustării este esențială pentru siguranță.

Este interzis să forțați copilul sau utilizatorul să mențină o anumită poziție, deoarece acest lucru poate provoca disconfort și postură incorectă.

Verificați întotdeauna ca toate centurile și mecanismele de blocare să fie fixate corect.

7.3 Poziția verticală

Durata procesului de verticalizare variază pentru fiecare utilizator. Se recomandă creșterea treptată a timpului în perioada inițială (adaptare la noua poziție).

Decizia privind durata procesului de verticalizare trebuie luată de medic sau fizioterapeut. Procesul de verticalizare trebuie efectuat întotdeauna sub supravegherea unei persoane instruite.

Se recomandă divertismentul utilizatorului în timpul procesului (jocuri educative, stimulare tactilă etc.).

ATENȚIE!

Este foarte important ca dispozitivul să fie ajustat corespunzător utilizatorului înainte de utilizare.

Nu lăsați utilizatorul nesupravegheat!

Doar personalul instruit poate ajusta cadrul pentru stat în picioare.

Prima poziție verticală:

Se realizează în unități de reabilitare, neurochirurgie sau ortopedie, sub supravegherea medicului și fizioterapeutului.

Pot apărea probleme medicale în timpul primelor ședințe, cum ar fi leșin, scădere a tensiunii arteriale, amețeli etc. Continuarea verticalizării se poate realiza acasă, împreună cu personal instruit (tehnician de reabilitare, asistent medical, membri instruiți ai familiei).

8. Reguli de siguranță

ATENȚIE!

Cadru SMART Pro™ trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare. Înainte de fiecare utilizare, pregătiți utilizatorul și dispozitivul.

Este foarte important să consultați medicul sau fizioterapeutul pentru a lua decizia corectă privind alegerea cadrului SMART Pro™ și a mărimii acestuia. De asemenea, este esențial să vă familiarizați cu instrucțiunile descrise în manualul de utilizare înainte de a folosi dispozitivul.

1. Înainte de utilizare este necesar să:

- verificați dacă nu există deteriorări sau defecte care ar putea pune în pericol viața utilizatorului; verificați dacă toate componentele funcționează și sunt montate corect și, în plus, verificați dacă nu sunt sparte;
- verificați dacă toate șuruburile, butoanele și toate părțile lipite, cusute sau înfiletate sunt strânse;
- verificați starea tapiteriei pentru eventuale semne de deteriorare;
- verificați dacă frânele funcționează corect;
- verificați dacă cataramele funcționează corect;
- folosiți întotdeauna centurile de siguranță; benzile Velcro trebuie să se suprapună minim 8 cm;
- reglați cadrul conform măsurătorilor și nevoilor utilizatorului, de exemplu ajustarea pelotelor etc.;
- asigurați-vă că toate părțile mobile și butoanele de reglaj sunt stabile

și blocate;

- securizați utilizatorul cu ajutoarele de stabilizare disponibile ale cadrului. Este foarte important să securizați utilizatorul deoarece previne căderea.

2. Este interzisă utilizarea cadrului în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.
3. Este interzisă utilizarea cadrului dacă este deteriorat sau lipsește vreo parte.
4. Este interzis să lăsați utilizatorul nesupravegheat.
5. Dispozitivul trebuie utilizat doar în prezența unei persoane instruite și competente.
6. Este interzis să lăsați cadrul și utilizatorul pe un teren instabil nesupravegheați, chiar dacă frâna este acționată.
7. Este interzisă urcarea sau coborârea scărilor, indiferent dacă utilizatorul se află sau nu în cadru.
8. Este important să acționați frâna atunci când intrați și ieșiți din cadru.
9. Asigurați-vă că toate membrele nu sunt aproape de spițe sau alte elemente ajustabile.
10. Cadrul trebuie depozitat și utilizat departe de surse de foc sau temperaturi ridicate. De asemenea, cadrul nu trebuie depozitat în încăperi cu umiditate ridicată.
11. Securizați cadrul în timpul transportului pentru a evita eventuale deteriorări. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele apărute din cauza pregătirii necorespunzătoare a dispozitivului în timpul transportului.
12. Înainte de utilizarea cadrului, îndepărtați toate ambalajele din hârtie și plastic. Ambalajul nu este jucărie! Țineți-l departe de copii și animale.

ATENȚIE!

Ajustarea incorectă a produsului poate duce la efecte secundare precum leșin, deformări ale corpului, suprasolicitarea articulațiilor etc. Dacă apar aceste simptome, opriți imediat utilizarea produsului, scoateți utilizatorul din cadru și așezați-l pe sol. Dacă simptomele nedorite persistă, contactați imediat un medic.

Dacă simptomele au dispărut, informați medicul curant despre acest fapt pentru a lua o decizie privind procesul de rehabilitare în continuare.

Incidentele grave care implică acest dispozitiv trebuie raportate atât producătorului, cât și autorității competente din țara dumneavoastră.

Dispozitivul conține piese mici care pot fi înghițite de copii.

Nu utilizați un produs care prezintă semne de deteriorare, distrugere sau uzură. Doar un produs complet funcțional, utilizat conform instrucțiunilor de utilizare, este sigur pentru utilizator. Dacă produsul este deteriorat, opriți utilizarea și contactați producătorul.

Este interzisă efectuarea unor modificări asupra structurii dispozitivului deoarece acest lucru este periculos și duce la pierderea garanției.

Greutatea utilizatorului nu trebuie să depășească greutatea maximă indicată la pagina 8, unde veți găsi informații detaliate în această privință.

9. Termeni de garanție

- Akces-MED Ltd. vinde produse fără defecte de fabricație sau defectiuni.
- Producătorul oferă cumpărătorului o **garanție de 24 de luni** de la data achiziției. Toate defectele constatate în perioada de garanție vor fi reparate **gratuit**.
- Toate defectele care apar după perioada de garanție pot fi reparate **doar contra cost**. Această regulă nu se aplică produselor returnate – utilizatorul poate solicita rambursarea prin programul național de rambursare a sănătății.
- Cadrul este acoperit de o **garanție de 36 de luni** pe teritoriul Canadei – detaliile privind drepturile rezultate din garanția extinsă sunt reglementate prin cardul de garanție.
- Producătorul afirmă că produsul poate fi utilizat **36 de luni**. Utilizatorul poate folosi acest produs după această perioadă **doar dacă trimite dispozitivul la producător pentru service**. Ulterior, producătorul va stabili din nou perioada de utilizare a produsului și, totodată, data următorului service.
- Dacă produsul este deteriorat, contactați dealerul nostru sau serviciul clienți Akces-MED Ltd.:

Tel: +48 17 864 04 77

E-mail: export@akces-med.com

10. Întreținere și curățare

Cadru SMART Pro™, care este un dispozitiv medical, trebuie să fie **întotdeauna curat** și utilizat conform instrucțiunilor producătorului. Cadrul trebuie păstrat într-o încăpere **curată, uscată și ventilată**. Întreținerea și curățarea trebuie efectuate **cel puțin o dată pe lună**. Curățarea și întreținerea periodică a dispozitivului sunt esențiale pentru a-i menține **funcționarea corespunzătoare și siguranța**.

Recomandări pentru curățarea tapițeriei și a altor elemente ale cadrului:

1. Spălați cu apă caldă, folosind o lavetă moale și detergenți blânzi.
2. Asigurați-vă că laveta nu este prea udă, deoarece acest lucru poate întinde pata și poate deteriora tapițeria sau spuma din interior.
3. Îndepărtați excesul de umiditate de pe tapițerie înainte de următoarea curățare.
4. Tapițeria **nu trebuie să se ude** în timpul curățării.
5. Nu scufundați tapițeria!
6. După curățarea petelor, tapițeria trebuie clătită cu apă caldută și ștersă cu o lavetă curată.
7. Nu folosiți perii dure pentru curățarea tapițeriei.
8. Nu curățați tapițeria cu substanțe chimice puternice, de ex. solvenți sau soluții pe bază de clor.
9. Nu curățați, nu înlocuiți niciun element și nu efectuați întreținerea cadrului **în timpul utilizării**.
10. Elementele metalice și din plastic trebuie curățate manual cu detergenți adecvați, după ce ați citit recomandările producătorului detergenților respectivi.
11. Este posibil să se dezinfecteze elementele metalice, plastice, din lemn și tapițeria produsului cu un dezinfectant disponibil pe piață. Pentru dezinfectare, pulverizați suprafața elementului cu dezinfectant și ștergeți cu o lavetă curată și uscată. După dezinfectare, așteptați până când elementul este complet uscat, în special în cazul tapițeriei. Înainte de folosirea dezinfectantului, testați mai întâi într-un loc invizibil dacă produsul nu se decolorează sau nu se deteriorează.

ATENȚIE!

Tapițeria trebuie să fie **întotdeauna uscată** înainte de utilizare!

Producătorul cadrului, Akces-MED Ltd., **nu este responsabil** pentru daunele cauzate de utilizarea detergenților nepotrivți.


Înainte de utilizare este necesar să:

- curățați roțile;
- verificați dacă baza și roțile sunt montate corect;
- verificați dacă frâna oprește rotirea roții;
- verificați dacă structura cadrului nu are rupturi sau deformări;
- verificați dacă toate părțile mobile funcționează și toate șuruburile, piulițele, butoanele etc. sunt strânse corect;
- verificați dacă centurile nu sunt tocite și dacă cataramele și clemele funcționează corect.

ATENȚIE!

Producătorul răspunde **doar pentru defectele ascunse** sau daunele care au apărut **în ciuda respectării de către utilizator a instrucțiunilor**.

În cazul apariției unor daune, este esențial să contactați persoana care v-a vândut produsul.

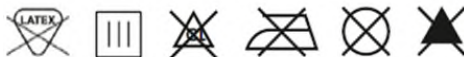

INSPECȚII TEHNICE

Inspecțiile tehnice ar trebui efectuate în mod regulat. Înainte de întreținere, produsul trebuie curățat temeinic pentru a dezvălui orice deteriorare ascunsă.

Frecvență	Ce ar trebui verificat? Ce ar trebui făcut?		Observații
Înainte de fiecare utilizare	Condiția generală a produsului	Verificați: • întregul produs pentru eventuale deteriorări vizibile, fisuri sau defecte mecanice, • dacă produsul	În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitoarul dumneavoastră sau Producătorul.

		este complet, • dacă toate șuruburile, bolțurile, butoanele, piulițele și celelalte elemente ale construcției sunt complete și bine strânse.	
	Roți și frâne	Verificați: • dacă roțile sunt montate corect și nu sunt deteriorate, • dacă frâna blochează roata la rotire, • dacă roțile nu sunt murdare. Dacă este necesar, curățați roțile.	În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitorul dumneavoastră sau Producătorul.
	Fixarea elementelor de construcție.	Verificați toate mecanismele produsului și piesele sale mobile. Verificați în special: • dacă șezutul este montat corect (dacă este cazul), • dacă roțile sunt	În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitorul dumneavoastră sau Producătorul.

		montate corect (dacă este cazul), • dacă elementele de fixare a utilizatorului sunt montate corect și funcționează bine (dacă este cazul), • dacă toate piesele mobile sunt complete, funcționează corect și nu se blochează, • dacă mecanismele de reglare ale următoarelor elemente funcționează corespunzător (dacă este cazul): tetieră, spătar, șezut, bloc de abducție, cotiere, suporturi pentru picioare.	
	Elemente de tapițerie	Verificați: • dacă există deteriorări, rupturi, desfășurări de cusături sau deformări ale elementelor de	În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitorul dumneavoastră sau Producătorul.

		tapițerie, • dacă centurile de stabilizare, vestele sau centurile de siguranță nu sunt tocite sau răsucite și dacă cataramele funcționează corect, • dacă centurile de stabilizare, vestele sau centurile de siguranță funcționează corespunzător și nu se deschid sub presiune sau la tragere.	
O dată pe săptămână	Curățarea produsului	Dacă cadrul și elementele de tapițerie se murdăresc (praf, noroi etc.) în timpul utilizării zilnice, ștergeți-le cu o cârpă umedă, fără detergenți. Îndepărtați murdăria (de exemplu, păr, resturi de	Produsul trebuie curățat atunci când este necesar, dar cel puțin o dată pe săptămână. Nu utilizați detergenți pe bază de clor sau alcool metilat. Înainte de a folosi produsul, verificați dacă elementele de tapițerie sunt uscate.

		alimente etc.) de pe piesele mobile ale produsului.	
O dată pe lună	Axe roți, conectori rapizi (dacă este cazul).	Verificați: • dacă roțile se învârt și dacă nu sunt slăbite. Pentru întreținerea roților, aplicați o cantitate mică de lubrifiant între ax și butucul roții. Verificați dacă roțile se pot monta și demonta cu ușurință.	Curățați roțile atunci când sunt murdare. În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitorul sau Producătorul.
	Conector de construcție (sudură, filetare, lipire)	Verificați: starea cadrului produsului în locurile de îmbinare (suduri, fire, lipire).	În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau Producătorul.
	Anvelope/inner tubes (dacă e aplicabil).	Verificați: Starea de uzură a anvelopei. Verificați dacă există deteriorări vizibile. Verificați presiunea în pneuri (dacă este cazul).	Dacă presiunea în anvelope este prea mică, umflați-le la nivelul corect. În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau

			Producătorul.
O dată la fiecare 6 luni	Construcția pieselor mobile.	Verificați: dacă părțile mobile ale construcției nu au fost deteriorate. Mențineți-le folosind un agent de curățare adecvat.	În cazul oricăror deteriorări sau defecte, întrerupeți utilizarea produsului și contactați Furnizorul / Distribuitorul sau Producătorul.
	Etichetarea produsul	• dacă marcajele și etichetele sunt lizibile.	În caz de deteriorări sau defecte, opriți imediat utilizarea produsului și contactați Furnizorul/Distribuitorul sau Producătorul.
După terminarea duratei de viață a produsului.	Verificarea detaliată a produsului.	Verificați produsul.	Producătorul specifică durata de viață a produsului, care este dată în manualul de utilizare. După perioada dată, utilizatorul poate utiliza produsul numai dacă acesta este trimis înapoi producătorului pentru a fi verificat mai întâi. După aceea, producătorul va redefini durata de viață a produsului și data următoarei verificări.

Lista tuturor pieselor de schimb este disponibilă pentru descărcare după ce selectați un produs pe www.akces-med.com

11. ETICHETARE

	Declarație că produsul îndeplinește cerințele esențiale		Uscați vertical
	Nr. serie		Nu folosiți clor
	Vă rugăm, citiți manualul de utilizare înainte de utilizare		Nu călcați
	Atenție		Nu folosiți curățare chimică
	Producător		Nu folosiți înălbitor
	Data de fabricație		Conținut delicat, fragil
	Produsul nu conține latex		Nr. catalog
	A se depozita în loc uscat		Limitare privind umiditatea relativă de depozitare
	A se proteja de lumina soarelui		Este interzis atât să urci, cât și să cobori scările.
	A se depozita în intervalul de temperatură		Nu contează dacă utilizatorul este plasat în dispozitiv sau nu Este interzis să lăsați utilizatorul nesupravegheat în timpul utilizării produsului.



Produs medical



Este interzisă utilizarea
fără centurile de
siguranță fixate
Trebuie să citiți
informațiile
suplimentare




Trebuie să citiți
informațiile
suplimentare



Trebuie să folosiți
instrumentele din kit-
ul de montare

PLACĂ DE IDENTIFICARE/PROBĂ.

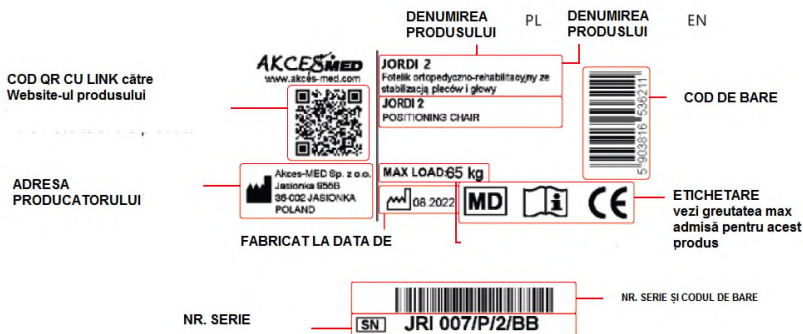

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

TABEL DE COMPATIBILITATE A SUPORTURILOR PENTRU PICIOARE

		
Mărimea cadrlui pentru stat în	Lungimea mărimii suporturilor pentru picioare	

picioare	XS (16 cm)	S (19 cm)	0 (16 cm)	1 (19 cm)	2 (23 cm)	3 (26 cm)	4 (30 cm)
1	1	1/2	x	x	x	x	x
2	+	+	1/2	1	1/2	x	x
3	+	+	+	1/2	1	1/2	+
4	+	+	+	+	1/2	1	1/2
5	+	+	+	+	1/2	1	1/2

Legendă:

1 – Echipament standard

½ - Poate fi modificat în timpul comenzii

x – nu se poate monta

+ Este disponibil ca varianta (nu este inclus în echipamentul standard și nu este inclus în preț la momentul comenzii)

Mărimea suportului	Lungime [cm]	Lățime [cm]		Mărime EU	Mărime UK	Mărime US	
	A	B	C				
1	16	9	7,5	20 - 25	4 - 7,5	4,5C - 8C	
2	19	9,5	7,5	26 - 30	8,5 - 12	9C - 12,5C	
3	23	10	8,5	31 - 35	12,5 - 2,5	13C - 3Y	
4	26	12	9	36 - 45	3,5 - 11	4Y - 12	
5	30	14,5	11	46 - 50	11,5 - 15	12,5 - 16	

Producător



Akces-MED Ltd.

Jasionka 955 B

36-002 Jasionka

tel. +48 17 864 04 7

e-mail: export@akces-med.com

BDO: 000031619



akces-med.com

Data emiterii: 01.03.2016

Ultima actualizare: 13.03.2023