

MANUAL DE UTILIZARE

2217

2219



Cuprins

Prefață.....	2
1. Produsul dvs.	4
1.1 Opțiuni	4
2. Înainte de prima utilizare	5
2.1. Scopul de utilizare	5
2.2. Instrucțiuni generale de siguranță.....	5
2.3. Simboluri de pe triciclu	6
2.4. Deplasarea triciclului	6
2.5 Depozitare	6
3. Utilizarea triciclului.....	6
3.1. Manevrarea frânelor	6
3.2 Operarea schimbătorului de viteze	7
3.3 Reglarea șeii	8
4. Întreținere	8
4.1. Puncte de întreținere	8
4.2. Instrucțiuni de întreținere	9
4.2.1. Roți și anvelope.....	9
4.2.2. Curățare.....	9
4.2.3. Dezinfectare.....	10
4.3. Depanare.....	10
4.4. Durata de viață estimată	10
4.5. Reutilizare	10
4.6. Sfârșitul utilizării	10
5. specificații tehnice	10

Prefață

Felicitări! Acum sunteți proprietarul unui triciclu Vermeiren!

Acest triciclu este realizat de personal calificat și dedicat. Este proiectat și produs conform standardelor înalte de calitate, garantate de Vermeiren.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual; vă va ajuta să vă familiarizați cu modul de

utilizare, capacitățile și limitele triciclului dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări după ce ați citit manualul, nu ezitați să contactați distribuitorul specialist. El/Ea vă va fi bucuros să vă ajute.

Notă importantă

Pentru a vă asigura siguranța și pentru a prelungi durata de viață a produsului, aveți grijă de acesta și verificați-l și efectuați-i întreținerea în mod regulat.

Acest manual reflectă cele mai recente evoluții ale produsului. Vermeiren își rezervă dreptul de a implementa modificări la acest tip de produs, fără nicio obligație de a adapta sau înlocui produse similare livrate anterior.

Imaginile produsului sunt folosite pentru a clarifica instrucțiunile din acest manual. Detaliile produsului ilustrat pot diferi de produsul dumneavoastră.

Informații disponibile

Pe site-ul nostru web <http://www.vermeiren.com> /, veți găsi întotdeauna cea mai recentă versiune a informațiilor din acest manual. Vă rugăm să consultați acest site în mod regulat pentru eventuale actualizări.

Persoanele cu deficiențe de vedere pot descărca versiunea electronică a acestui manual și o pot asculta cu ajutorul unui program de citire a textului (text-to-speech).

	Manual de utilizare Pentru utilizator și distribuitor specializat
	Instrucțiuni de instalare Pentru distribuitorul specializat
	Manual de service pentru tricicletă Pentru distribuitor specializat
	Declarație CE de conformitate

1. Produsul dvs.



1. Mânere
2. Clopoșel
3. Ghidon
4. Manete de frână
5. Reflector față
6. Aripă /
apărătoare
nori
7. Frâne față
8. Roată față
9. Cadru
10. Pedale
11. Carcasă lanț
12. Roți spate
13. Reflector spate
14. Tavă / suport
15. Șa
16. Plăcuță de
identificare



1.1 Opțiuni

Contactați dealerul specialist pentru opțiuni. El vă va sfătui cu plăcere

2. Înainte de prima utilizare

2.1. Scopul de utilizare

- **Indicații și contraindicații:** Utilizatorul poate conduce triciclul singur. Triciclul este destinat persoanelor cu articulații rigide sau afectate, insuficiență cardiacă sau circulație sanguină deficitară, tulburări de echilibru, cașexie etc. Nu trebuie să folosiți această triciclu dacă suferiți de afecțiuni fizice sau mentale care vă pot pune pe dumneavoastră sau pe alte persoane în pericol în timpul utilizării. Din acest motiv, consultați mai întâi medicul și asigurați-vă că dealerul dumneavoastră specialist este informat cu privire la recomandările acestuia.
- Triciclul este adecvat pentru utilizare în exterior.
- Triciclul este proiectat și produs exclusiv pentru transportul unei singure persoane, cu greutatea maximă specificată în §5. Nu este destinat transportului de bunuri grele sau obiecte, și nici altor utilizări în afara celor descrise anterior.
- Utilizați doar accesorii și piese de schimb aprobate de Vermeiren.
- Vă rugăm să citiți toate detaliile tehnice și limitele triciclului în capitolul 5.
- Garanția acestui produs se aplică în cazul unei utilizări și întrețineri normale, conform celor descrise în acest manual. Deteriorările cauzate de utilizare necorespunzătoare sau de lipsa întreținerii vor duce la pierderea garanției.

2.2. Instrucțiuni generale de siguranță

ATENȚIE

Risc de rănire și/sau deteriorare

- Citiți cu atenție și urmați instrucțiunile din acest manual. În caz contrar, vă puteți răni sau triciclul poate fi deteriorată.

Țineți cont de următoarele avertizări generale în timpul utilizării:

- Nu utilizați triciclul dacă vă aflați sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe care vă pot afecta capacitatea de a conduce.
- Fiți conștient că unele componente ale triciclului se pot încălzi sau răci excesiv din cauza temperaturii ambientale, radiației solare sau a dispozitivelor de încălzire. Aveți grijă când le atingeți. Purtați îmbrăcăminte de protecție dacă vremea este rece.
- Nu modificați triciclul în niciun fel.
- Pentru a preveni rănirile și/sau deteriorarea triciclului, asigurați-vă că niciun obiect și/sau nicio parte a corpului nu ajunge între spițele roților.
- Analizați efectele schimbării centrului de greutate asupra comportamentului triciclului, de exemplu la urcarea sau coborârea pantelor, pe teren înclinat lateral sau la trecerea peste obstacole.
- Triciclul trebuie utilizat în conformitate cu reglementările rutiere aplicabile.
- Adaptați modul de condus la condițiile meteo și de trafic.
- Pentru a fi mai vizibil pe timp de întuneric, purtați haine cât mai luminoase sau cu elemente reflectorizante și verificați dacă reflectoarele montate în față și în spate sunt clar vizibile.

- Nu depășiți niciodată sarcina maximă admisă a triciclului.
- Fiți atent în viraje, deoarece triciclul poate pierde stabilitatea laterală.

În cazul în care are loc un incident grav în care este implicat produsul dumneavoastră, anunțați Vermeiren sau dealerul specialist, precum și autoritatea competentă din țara dumneavoastră.

2.3. Simboluri de pe triciclu

	Greutatea maximă a utilizatorului în kg
	Denumire tip

2.4. Deplasarea triciclului

Cea mai bună modalitate de a deplasa triciclul este să folosiți roțile și să o rulați până la locul dorit.

2.5 Depozitare

INFORMAȚII

Asigurați-vă că triciclul este depozitat într-un mediu uscat pentru a preveni apariția mucegaiului și deteriorarea tapițeriei; vedeți și capitolul 5.

3. Utilizarea triciclului

AVERTISMENT

Risc de rănire


- Înainte de toate, citiți capitolele anterioare și informați-vă despre utilizarea recomandată. NU folosiți triciclul dacă nu ați citit și înțeles complet toate instrucțiunile.
- În caz de îndoieli sau întrebări, nu ezitați să contactați distribuitorul specializat local, furnizorul de servicii de îngrijire sau un consultant tehnic pentru asistență.

3.1. Manevrarea frânelor

AVERTISMENT

Risc de rănire

- Funcționarea corectă a frânelor este influențată de uzura și contaminarea anvelopelor (apă, ulei, noroi etc.) – Verificați starea anvelopelor înainte de fiecare utilizare.
- Frânele sunt reglabile și se pot uza – Verificați funcționarea frânelor înainte de fiecare utilizare.

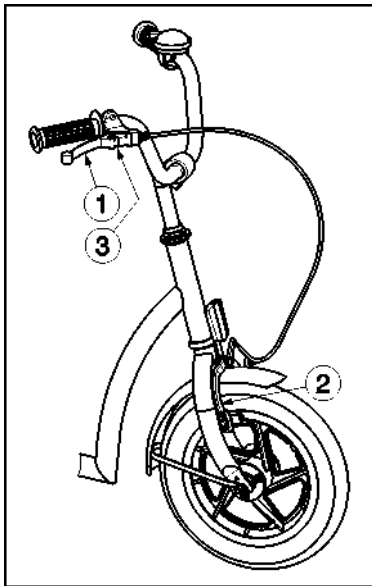

Pentru a acționa frâna roții din față:

1. Apăsați maneta de frână (1) spre mâner.
2. Frâna (2) trebuie să fie presată pe roata din față.

Pentru a elibera frâna roții din față:

1. Eliberați maneta de frână (1).

Activarea frânei de parcare:


Blocați frânele împingând plăcuța (3).

Frâna roții din spate poate fi acționată în același mod ca frâna roții din față.

La achiziție se poate alege maneta din stânga sau din dreapta.

Pentru a acționa frâna torpedo (2) pe roțile din spate:

Rotiți pedalele (1) în sens invers (înapoi).

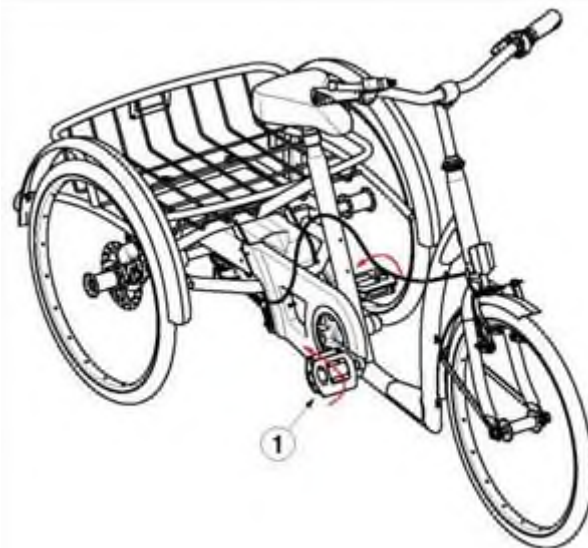


3.2 Operarea schimbătorului de viteze

ATENȚIE: Risc de accidentare – Asigurați-vă că schimbați vitezele câte una pe rând și reduceți forța aplicată asupra pedalelor în timpul schimbării. Dacă încercați să forțați maneta de schimbare în timp ce pedalele sunt apăstate puternic, picioarele vă pot aluneca de pe pedale, iar triciclul se poate răsturna.

Rotiți maneta de schimbare pentru a selecta fiecare dintre cele trei viteze.

1. = Indicator

2. = Maneta de schimbare

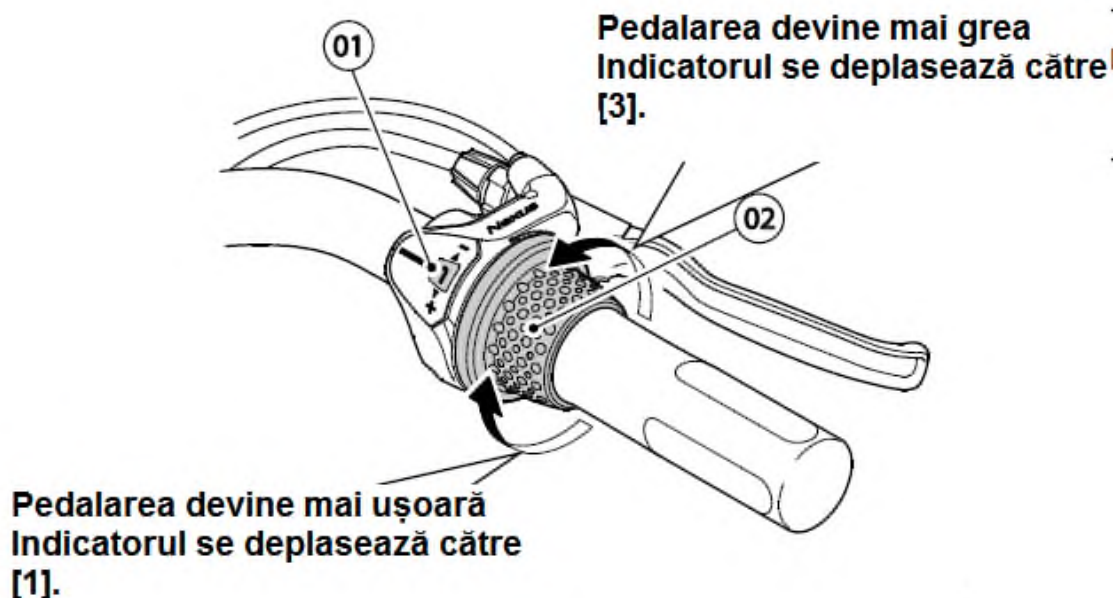

1. Pornire / Deplasare pe suprafețe nisipoase sau denivelate / Urcarea pantelor / Transportul de încărcături grele / Deplasare împotriva vântului / Când lumina este aprinsă
2. Deplasare pe suprafețe plane
3. Deplasare la viteze ridicate

Schimbătorul cu 7 viteze este disponibil doar pentru triciclu model 2219.

3.3 Reglarea șei

ATENȚIE: Risc de accidentare – Nu ajustați niciodată șaua atunci când utilizatorul stă pe ea.

ATENȚIE: Risc de accidentare – Verificați ca șaua să fie bine fixată înainte de a folosi triciclu.



Reglați înălțimea șei după cum urmează (fără trepte):

1. Slăbiți șurubul (1).
2. Reglați înălțimea șei (2) într-o poziție confortabilă.
3. Strângeți bine șurubul (1).

Înălțimea maximă este marcată cu o linie dreaptă.

4. Întreținere

4.1. Puncte de întreținere

ATENȚIE

Risc de accidente și deteriorări

- Reparațiile și înlocuirile pot fi efectuate doar de persoane instruite și se vor folosi exclusiv piese originale Vermeiren.

INFORMAȚII

Frecvența serviciilor depinde de intensitatea și frecvența utilizării. Contactați distribuitorul dumneavoastră pentru a stabili un program comun pentru inspecție, întreținere și reparații.

Pentru manualul de întreținere, consultați site-ul Vermeiren: www.vermeiren.com

Înainte de fiecare utilizare

Inspectați următoarele puncte:

- Toate piesele: Prezente și nedeteriorate sau neuzate
- Toate piesele: Curate, vezi §4.2.2
- Starea roților/anvelopelor, vezi §4.2.1
- Starea componentelor cadrului: Fără deformări, instabilitate, slăbiciune sau conexiuni libere
- Frâne: Nedeteriorate și complet funcționale

Contactați dealerul specializat pentru eventuale reparații sau înlocuiri de piese.

O dată pe an sau mai des

Faceți ca triciclul dumneavoastră să fie inspectat și întreținut de dealerul specialist cel puțin o dată pe an sau chiar mai des. Frecvența minimă de întreținere depinde de modul de utilizare și trebuie, prin urmare, stabilită de comun acord cu dealerul dumneavoastră specialist

4.2. Instrucțiuni de întreținere

4.2.1. Roți și anvelope

INFORMAȚII

Funcționarea corectă a frânelor depinde de starea anvelopelor și poate fi influențată de uzură sau contaminare (apă, ulei, noroi etc.).

Mențineți roțile curate, fără fire, păr, nisip sau fibre.

Verificați profilul anvelopelor. Dacă adâncimea benzii de rulare este mai mică de 1 mm, anvelopele trebuie înlocuite. Contactați dealerul specializat.

Umflați fiecare anvelopă pneumatică la presiunea corectă (vezi indicația de pe anvelope).

4.2.2. Curățare

ATENȚIE

Risc de deteriorare prin umiditate

- Nu folosiți furtun sau aparat de curățare sub presiune pentru tricicletă.

Curățați toate piesele rigide cu o cârpă ușor umedă (nu înmuiată). Dacă este necesar, folosiți un săpun delicat, potrivit pentru lacuri și materiale sintetice.

Tapițeria poate fi curățată cu apă caldă și săpun delicat. Nu folosiți substanțe

abrazive.

4.2.3. Dezinfectare

ATENȚIE

Risc de deteriorare

- Dezinfectarea poate fi efectuată doar de persoane instruite. Consultați dealerul specializat.

4.3. Depanare

Chiar dacă folosiți triciclul corect, pot apărea probleme tehnice. În acest caz, contactați dealerul local specializat.

AVERTISMENT

Risc de accidente și deteriorări

- NU încercați să reparați triciclul singur.

Următoarele simptome pot indica o problemă gravă. Prin urmare, contactați întotdeauna dealerul specialist dacă observați oricare dintre următoarele deviații:

- Sunete ciudate;
- Uzură neuniformă a unei anvelope;
- Mișcări sacadate;
- Ansambluri de roți deteriorate sau rupte.

4.4. Durata de viață estimată

Triciclul este proiectată pentru o durată medie de viață de 5 ani. Aceasta poate crește sau scădea în funcție de frecvența utilizării, condițiile de rulare și întreținere.

4.5. Reutilizare

Înainte de fiecare reutilizare, triciclul trebuie dezinfectată, inspectată și întreținută conform §4.1 și §4.2.

4.6. Sfârșitul utilizării

La sfârșitul vieții utile, triciclul trebuie eliminată conform legislației locale de mediu. Cea mai bună metodă este dezasamblarea triciclului pentru a facilita transportul pieselor reciclabile.

5. Specificații tehnice

Detaliile tehnice de mai jos sunt valabile doar pentru această tricicletă, la setările standard și în condiții optime de mediu.

Marcă	Vermeiren
Tip	Tricicletă
Nume	2217, 2219

Descriere	2217 Aqua, Safari	2219 Sporty, Happy
Greutatea maximă a ocupantului	110 kg	125 kg
Sarcina maximă a coșului	25 kg	25 kg
Lățimea totală	670 mm	768 mm
Lungimea totală	1600 mm	1808 mm
Înălțimea totală	986 mm - 1174 mm	1121 mm - 1309 mm
Greutatea totală	25,5 kg	27,80 kg
Înclinație maximă sigură	7°	7°
Garda la sol	97 mm	125 mm
Înălțimea cadrului (înălțimea de urcare)	174 mm	194 mm
Diametrul roților față	20" x 1,75	24" x 1 3/8"
Presiunea roților față	2,5 - 5 bar	3,5 bar
Diametrul roților spate	20" x 1,75	24" x 1 3/8"
Presiunea roților spate	2,5 - 5 bar	3,5 bar
Înălțimea șei	709 mm - 950 mm	789 mm - 1030 mm
Distanța dintre șa și pedală	586 mm - 827 mm	640 mm - 880 mm
Înălțimea mânerelor (măsurată de la sol)	Depinde de modelul ghidonului și de tijă.	Depinde de modelul ghidonului și de tijă.
Înălțimea minimă a pedalei	123 mm	150 mm
Înălțimea maximă a pedalei	373 mm	455 mm
Distanța dintre șa și ghidon	372 mm - 401 mm Ajustabilă: -20 mm	417 mm - 446 mm Ajustabilă: -20 mm
Diametrul de virare	2750 mm	3000 mm
Viteză spate	3	3/7
Viteză față	-	-
Raport de transmisie	184%	184% / 184%
Frâne	Frână V-brake - față Frână cu disc - spate (frână torpedo disponibilă - frână cu disc opțională)	Frână V-brake - față Frână cu disc - spate (frână torpedo disponibilă - frână cu disc opțională)
Temperatura de depozitare și utilizare	+ 5 °C - +41°C	
Umiditatea de depozitare și utilizare	30% - 70%	
Ne rezervăm dreptul de a introduce modificări tehnice. Toleranță la măsurători: ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5°.		

Tabel 1: Specificații tehnice



Formular de înregistrare a serviciului

Acest produs (denumire):

a fost inspectat (I), întreținut (S), reparat (R) sau dezinfectat (D):

De către (ștampilă)	De către (ștampilă)	De către (ștampilă)
Mod de lucru: I / S / R / D	Mod de lucru: I / S / R / D	Mod de lucru: I / S / R / D
Data:	Data:	Data:
De către (ștampilă)	De către (ștampilă)	De către (ștampilă)
Mod de lucru: I / S / R / D	Mod de lucru: I / S / R / D	Mod de lucru: I / S / R / D
Data:	Data:	Data:
De către (ștampilă)	De către (ștampilă)	De către (ștampilă)
Mod de lucru: I / S / R / D	Mod de lucru: I / S / R / D	Mod de lucru: I / S / R / D
Data:	Data:	Data:
De către (ștampilă)	De către (ștampilă)	De către (ștampilă)
Mod de lucru: I / S / R / D	Mod de lucru: I / S / R / D	Mod de lucru: I / S / R / D
Data:	Data:	Data:
De către (ștampilă)	De către (ștampilă)	De către (ștampilă)
Mod de lucru: I / S / R / D	Mod de lucru: I / S / R / D	Mod de lucru: I / S / R / D
Data:	Data:	Data:

VERMEIREN GROUP



Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgium

Website: www.vermeiren.com

Instrucțiuni pentru distribuitorul specialist

Acest manual de instrucțiuni face parte integrantă din produs și trebuie să însoțească fiecare produs vândut.

Varianta: J, 2023-06

Cod UDI de bază 5415174121806221759

541517412180622195D

Toate drepturile rezervate, inclusiv traducerea.