



AirFit™ N20
AirTouch™ N20
Nasal mask




User guide

English | Español | Português | Ελληνικά | Türkçe |
Polski | Magyar | Română | Български | Český

AirFit™ N20

AirTouch™ N20





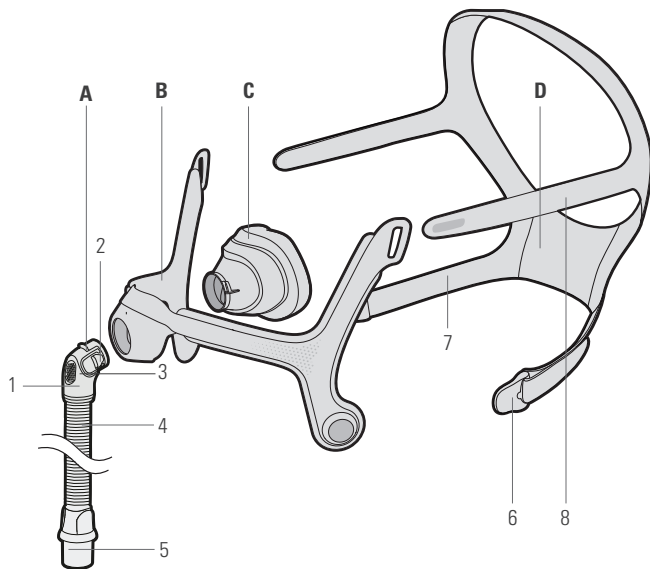


Mask Components / Piezas de la mascarilla / Componentes da máscara / Εξαρτήματα της μάσκας / Maske bileşenleri / Elementy maski / A maszk részei / Componente mască / Компоненти на маската / Součásti masky



A	Elbow and short tube / Codo y tubo corto / Cotovelo e tubo curto / Γωνία και σωλήνας μικρού μήκους / Dirsek ve kısa tüp / Kolanko i krótka rurka / Könyökidom és rövid csővezeték / Cot și tub scurt / Коляно и къса тръбичка / Rameno a krátká trubice
1	Elbow / Codo / Cotovelo / Γωνία / Dirsek / Kolanko / Könyökidom / Cot / Коляно / Rameno
2	Side buttons / Botones laterales / Botões laterais / Πλευρικά κουμπιά / Yan düğmeler / Przyciski boczne / Oldalsó gombok / Butoane laterale / Странични бутони / Postranní tlačítka
3	Vent / Orificios de ventilación / Respiradouro / Άνοιγμα εξαερισμού / Hava deliği / Odpowietrznik / Szellőzőnyílás / Orificiu / Отдушник / Ventilační otvor
4	Short tube / Tubo corto / Conjunto de tubo / Σωλήνας μικρού μήκους / Kısa tüp / Krótka rurka / Rövid csővezeték / Tub scurt / Къса тръбичка / Krátká trubice
5	Swivel / Pieza giratoria / Peça giratória / Στροφέας / Halka / Złącze obrotowe / Forgó csukló / Articulație / Шарнир / Kloubové upevňení
B	Frame / Armazón / Armação / Πλαίσιο / Çerçeve / Ramka / Keret / Cadru / Стойка / Telo masky
C	Cushion / Almohadilla / Almofada / Μαξιλάρι / Yastık / Uszczelka / Párna / Perniță / Възглавничка / Polštářek
D	Headgear / Arnés / Arnês / Ιμάντες κεφαλής / Başlık / Część nagłowna / Fejránt / Нам / Приспособление за закрепване към главата / Náhlavní souprava

6	Magnetic clips / Pinzas magnéticas / Presilhas magnéticas / Μαγνητικά κλιπ / Manyetik klipsler / Klipsy magnetyczne / Mágneses kapcsok / Cleme magnetice / Магнитни закопчалки / Magnetické klipy
7	Lower headgear straps / Correas inferiores del arnés / Correias inferiores do arnês / Κάτω λουράκια ιμάντων κεφαλής / Alt başlık bantları / Dolne paski części nagłownej / Alsó fejpántszíjak / Curele inferioare ham / Долни ремъци на приспособлението за закрепване към главата / Spodní pásky náhlavní soupravy
8	Upper headgear straps / Correas superiores del arnés / Correias superiores do arnês / Πάνω λουράκια ιμάντων κεφαλής / Üst başlık bantları / Górne paski części nagłownej / Felső fejpántszíjak / Curele suport de cap superioare / Горни ремъци на приспособлението за закрепване към главата / Horní pásky náhlavní soupravy



Fitting / Colocación / Colocação / Τοποθέτηση της μάσκας / Maskenin Takılması / Zakładanie / Felhelyezés /
Fixarea măștii / Постановка / Nasazení masky

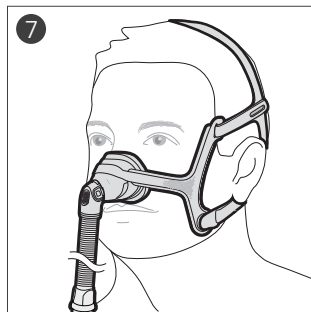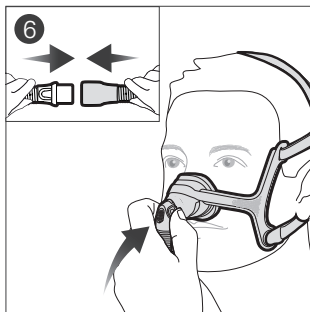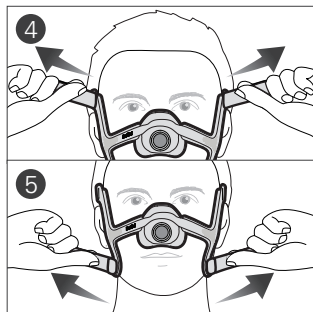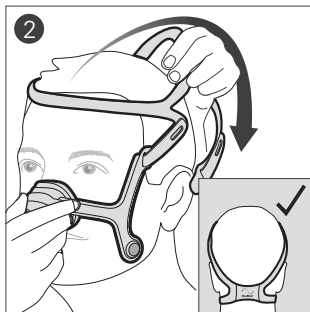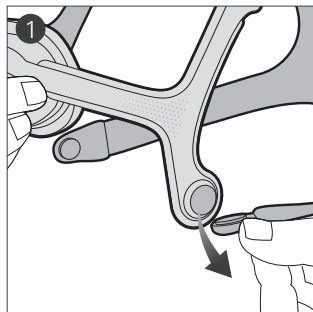




Adjustment / Ajuste / Ajuste / Προσαρμογή / Ayarlama / Regulacja / Beállítás / Ajustare / Регулиране / Úprava masky

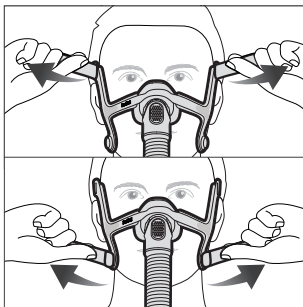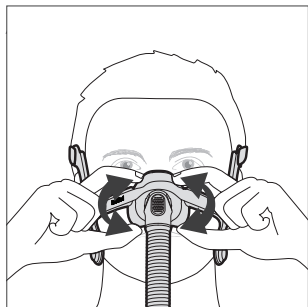



Removal / Retirada / Remoção / Αφαίρεση / Çıkarma / Zdejmowanie / Eltávolítás / Înderărtare / Сваляне / Sejmutí masky

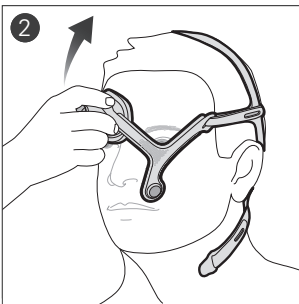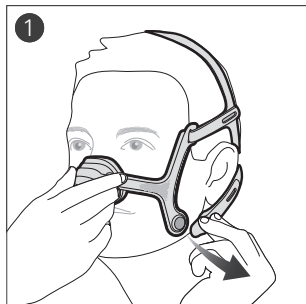

Disassembly / Desmontaje / Desmontagem / Αποσυναρμολόγηση / Sökme / Demontaž / Szétszerelés /
Dezasamblare / Разглобяване / Demontáž

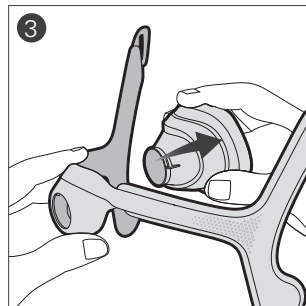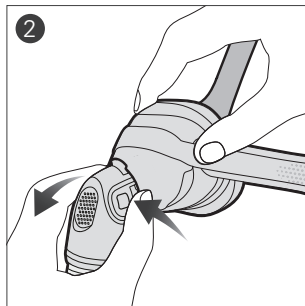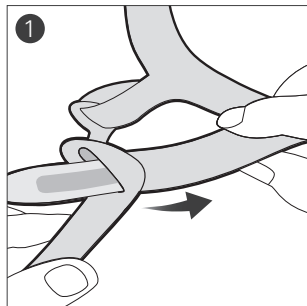

Reassembly / Nuevo montaje / Nova montagem / Επανασυναρμολόγηση / Yeniden montaj / Składanie /
Ismételt összeszerelés / Reasamblare / Повторно сглобяване / Орѣтовнѣ sestavení

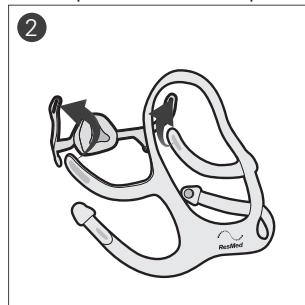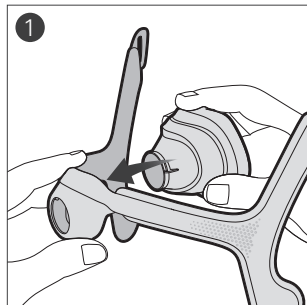

ROMÂNĂ

Vă mulțumim că ați ales AirFit™ N20/AirTouch™ N20. Aceste măști sunt identice - cu excepția pernței din silicon AirFit N20 și a pernței din spumă AirTouch N20 care sunt interschimbabile. Acestea vă oferă două alegeri pentru masca dumneavoastră, în funcție de gradul de confort, stabilitate și etanșare preferat. Este posibil ca aceste măști să nu fie disponibile în toate țările.

Utilizarea acestui ghid

Vă rugăm să citiți întregul ghid înainte de utilizare. Când urmați instrucțiunile, consultați imaginile de la începutul ghidului.

Utilizare

Măștile nazale AirFit N20 și AirTouch N20 canalizează fluxul de aer într-un mod neinvaziv către un pacient de la un dispozitiv cu presiune pozitivă (PAP), precum un dispozitiv cu presiune pozitivă continuă (CPAP) sau un dispozitiv de nivel dublu N20:

- se utilizează de către pacienții a căror greutate depășește 30 kg și cărora li s-a prescris presiune pozitivă pentru căile respiratorii
- este destinat unui singur utilizator pentru reutilizare în mediu domestic și reutilizare la mai mulți pacienți în mediu spitalicesc/instituțional.

Perniță AirTouch N20

Pernița AirTouch N20 este concepută pentru a putea fi reutilizată de către un singur pacient, atât la domiciliu, cât și în spital/mediul instituțional, și se recomandă înlocuirea lunară a acesteia.



AVERTISMENT

În benzile inferioare ale dispozitivului de fixare și în cadrul măștii sunt utilizați magneți. Asigurați-vă că dispozitivul de fixare și cadrul sunt menținute la cel puțin 50 mm distanță de orice implant medical activ (de exemplu, stimulator cardiac, defibrilator, valvă de derivație magnetică pentru lichidul cerebrospinal (CSF), implanturi cohleare etc.), pentru a evita posibilele efecte ale câmpurilor magnetice localizate. Intensitatea câmpurilor magnetice este mai mică de 400 mT.

Beneficii clinice

Beneficiul clinic al măștilor ventilate este asigurarea administrării eficiente a tratamentului de la un dispozitiv de tratament la pacient.

Populația de pacienți/afecțiunile medicale avute în vedere

Boli pulmonare obstructive (de exemplu, boală pulmonară obstructivă cronică), boli pulmonare restrictive (de exemplu, boli ale parenchimului pulmonar, boli ale peretelui toracic, boli

neuromusculare), tulburări de reglare centrală a respirației, apnee obstructivă în somn (AOS) și sindromul de obezitate-hipoventilație (SOH).

Contraindicații

Utilizarea măștilor cu componente magnetice este contraindicată pentru pacienții cu următoarele afecțiuni preexistente:

- o pensă hemostatică din metal implantată în craniul dumneavoastră pentru repararea unui anevrism
- fragmente metalice în unul sau ambii ochi.

Fixarea măștii dvs.

1. Răsuciți și trageți de ambele cleme magnetice din cadru.
2. Când ambele curele inferioare ale hamului sunt desfăcute, țineți masca orientată spre fața dumneavoastră și trageți hamul peste cap.

Verificare ham:

Asigurați-vă că sigla ResMed de pe ham este orientată spre exterior și vertical când hamul este fixat.

3. Coborâți curelele inferioare sub urechi și atașați cleva magnetică de cadru.
4. Desfaceți inelele de fixare de pe curelele superioare ale hamului. Ajustați ambele curele până când masca este poziționată confortabil chiar deasupra nasului dumneavoastră. Reatașați inelele de fixare.

5. Desfaceți inelele de fixare de pe curelele inferioare ale hamului. Ajustați ambele curele până când masca devine stabilă. Reatașați inelele de fixare.
6. Conectați tuburile de aer ale dispozitivului la tubul scurt. Atașați cotul la mască apăsând pe butoanele laterale și cotul în mască, asigurându-vă că acesta se fixează în ambele părți.
7. Masca și hamul se vor poziționa conform ilustrației.

Ajustarea măștii

Dacă este necesar, ajustați ușor poziția măștii, astfel încât să vă simțiți cât mai confortabil cu aceasta. Asigurați-vă că hamul nu este răsucit, iar la AirFit N20 pernița nu este sfonată.

1. Porniți aparatul pentru a introduce aer.

Recomandări privind ajustarea:

- Pentru a soluționa pierderile din partea superioară a măștii, ajustați curelele superioare ale hamului. În ceea ce privește partea inferioară, ajustați curelele inferioare ale hamului. Ajustați doar până obțineți o etanșeitate care oferă confort.
- Ajustarea curelei superioare este esențială pentru etanșeitate și confort.
- Nu strângeți prea mult curelele inferioare pentru că acestea servesc îndeosebi la menținerea perniței în poziție.

Îndepărtarea măştii

1. Răsuciți și trageți de ambele cleme magnetice din cadru.
2. Scoateți masca de pe față și spate peste cap.

Dezasamblarea măştii pentru curățare

Dacă masca este conectată la dispozitivul dumneavoastră, deconectați tuburile de aer ale dispozitivului de la tubul scurt.

1. Desfaceți inelele de fixare de pe curelele superioare ale hamului și scoateți-le din cadru. Păstrați clemele magnetice atașate la curelele inferioare ale hamului.
2. Îndepărtați cotul din mască apăsând pe butonul lateral și scoțând cotul.
3. Țineți cadrul punând degetul mare deasupra fantei laterale. Trageți pernița din cadru.

Reasamblarea măştii

1. Împingeți pernița în cadru. Cadrul are o formă care vă permite să introduceți pernița doar într-o singură direcție.
2. Cu sigla ResMed de pe ham orientată în afară și vertical, introduceți curelele superioare ale hamului în fantele cadrului din interior. Îndoțiți-le pentru a le asigura.

Curățarea măştii acasă

Este important să urmați pașii de mai jos pentru a obține performanțe optime de la masca dumneavoastră.



AVERTISMENT

- Pentru a păstra igiena corespunzătoare, respectați întotdeauna instrucțiunile de curățare și utilizați un detergent slab concentrat. Anumite produse de curățare pot deteriora masca, piesele sale și funcționarea acestora sau pot lăsa vapori remanenți dăunători care ar putea fi inhalați dacă dispozitivul nu este curățat bine.
- Curățați în mod regulat masca și componentele acesteia pentru a menține calitatea măştii dumneavoastră și pentru a împiedica dezvoltarea microbilor care pot afecta negativ sănătatea dumneavoastră.



ATENȚIE

Criterii vizuale pentru inspectarea produsului: În caz de constatare a unei deteriorări vizibile a unei componente de sistem (crăpare, zgârietură, ruptură etc.), aceasta se va înlocui și înlocui.

Odată ce ați dezasamblat masca, curățați componentele în maniera descrisă mai jos.

Perniță AirFit N20, cot și tub scurt (Zilnic/După fiecare utilizare)

1. Înmuiați și agitați pernița AirFit N20, cotul și tubul scurt în apă caldă (aproximativ 30°C) utilizând un detergent lichid, slab concentrat, timp de până la 10 minute.
2. Curățați componentele cu o perie moale, acordând o atenție specială orificiilor mici de ventilație de pe cot.
3. Clătiți din abundență componentele sub apă caldă de la robinet de calitatea celei potabile.
4. Inspectați componentele pentru a vă asigura că acestea sunt vizual curate și nu conțin reziduuri de detergent. Dacă este necesar, repetați spălarea.
5. Permiteți uscarea completă a componentelor înaintea asamblării, însă nu la lumina directă a soarelui.

Ham, cadru (Săptămânal)

Clemele magnetice de pe cadru pot fi păstrate la locul lor în timpul curățării.

1. Înmuiați și agitați hamul și cadrul, separat, în apă caldă (aproximativ 30 °C), utilizând un detergent lichid, slab concentrat, timp de până la 10 minute.
2. Pentru a clăti componentele, storceți-le repetat sub apă caldă de la robinet de calitatea celei potabile până când orice reziduuri de detergent sunt eliminate.
3. Storceți componentele pentru a elimina apa în exces.

4. Permiteți uscarea completă a componentelor înaintea asamblării, însă nu la lumina directă a soarelui.

Pernița AirTouch N20 (atunci când este necesar)



ATENȚIE

- Pernița nu trebuie scufundată în lichid deoarece poate fi distrusă și poate influența eficacitatea măștii.
- Aruncați pernița dacă este scufundată în lichid sau foarte murdară.
- Nu expuneți pernița la produse de curățare sau dispozitive de curățare de uz casnic.

Nu este nevoie să curățați pernița AirTouch N20 în fiecare zi. Se recomandă înlocuirea lunară a perniței dumneavoastră. În caz de constatare a unei deteriorări vizibile a perniței, aceasta se va înlocui. Dacă este necesar, ștergeți partea exterioară a perniței din spumă cu șervețele pentru dispozitive CPAP sau alte șervețele similare fără alcool și lăsați pernița la uscat. A nu se depozita sau amplasa în lumina directă a soarelui.

Depanarea

Problemă/cauză posibilă	Soluție
Masca este prea zgometoasă.	
Orificiul de ventilație este murdar.	Curățați orificiul de ventilație conform instrucțiunilor.
Masca este asamblată incorrect.	Dezasamblați masca, apoi reasamblați-o conform instrucțiunilor.

Problemă/cauză posibilă	Soluție	Problemă/cauză posibilă	Soluție
Cotul și tubul scurt au fost montate incorect	Îndepărtați cotul și tubul scurt din cadrul măștii, iar apoi reasamblați-le conform instrucțiunilor.	(Exclusiv pentru AirFit N20) Membrana perniței este șifonată sau îndoită.	Scoateți și reasezați masca conform instrucțiunilor de fixare a măștii. Asigurați-vă că poziționați pernița corect peste nas înainte de a scoate hamul peste cap. Nu glisați masca în josul feței dumneavoastră în timp ce o fixați pentru că acest lucru ar putea duce la îndoirea sau răsucirea perniței.
Masca prezintă pierderi.	Reasezați sau repositionați masca. Reajustați curelele hamului pentru a apropia masca de față și pentru a îmbunătăți etanșeitatea. Verificați ca masca să fie asamblată corect.	Pernița nu este poziționată corect.	Repositionați-vă masca pe față. În cazul în care există în continuare pierderi, opriți dispozitivul, reasezați pernița și apoi reporniți dispozitivul.
Masca prezintă pierderi în jurul feței.		(Exclusiv pentru AirTouch N20) Durata de viață a perniței se apropie de sfârșit	Performanțele perniței pot avea de suferit pe măsură ce puma se apropie finalul duratei sale de viață. Ajustați hamul, iar dacă problema persistă, înlocuiți pernița.
Masca nu este poziționată corect.	Verificați ca indicatorul de dimensiune a măștii să fie orientat în jos, spre partea inferioară a perniței de-a lungul bazei nasului dumneavoastră.	Masca nu este strânsă corect.	Asigurați-vă că nu ați strâns prea tare curelele hamului sau că acestea nu sunt slăbite prea mult. Este posibil să constatați că această mască nu necesită să fie strânsă precum alte măști nazale. Verificați ca hamul să nu fie răsucit.
Este posibil ca masca să nu fie reglată corect.	Scoateți masca de pe față și repositionați-o, asigurându-vă că părțile inferioare ale măștii vă încadrează nasul complet. Dacă este necesar, reajustați curelele hamului pentru a menține masca în poziția corectă.	Este posibil ca dimensiunea măștii să fie incorectă.	Discutați cu clinicianul dumneavoastră pentru a vă verifica dimensiunile feței în comparație cu șablonul de ajustare. Țineți seama de faptul că dimensionarea diferitelor măști nu este întotdeauna aceeași.
Este posibil ca pernița să fie murdară.	Curățați pernița conform instrucțiunilor.		

Problemă/cauză posibilă	Soluție
Masca nu este reglată corect.	
Masca este asamblată incorect.	Dezasamblați masca, apoi reasamblați-o conform instrucțiunilor.
Este posibil ca dimensiunea măștii să fie incorectă.	Discutați cu clinicianul dumneavoastră pentru a vă verifica dimensiunile feței în comparație cu șablonul de ajustare. Rețineți că dimensiunile pot să difere de la o mască la alta.

AVERTISMENTE GENERALE

- Orificiile de ventilație trebuie păstrate curate.
- Masca se va utiliza doar cu dispozitive CPAP sau cu dispozitive de nivel dublu recomandate de un medic sau un terapeut specializat în respirație.
- Masca nu se va utiliza dacă dispozitivul nu este pornit. După ce masca este ajustată, asigurați-vă că dispozitivul introduce aer. Explicație: Dispozitivele CPAP și dispozitivele de nivel dublu sunt destinate a fi utilizate cu măști speciale (sau conectori) care au orificii de ventilație pentru a permite ieșirea continuă de aer prin mască. Când dispozitivul este pornit și funcționează în mod corespunzător, un flux de aer nou de la dispozitiv scoate aerul expirat prin orificiile de ventilație ale măștii. Totuși, când dispozitivul nu este în funcțiune, prin mască va fi furnizat aer curat insuficient, iar aerul expirat ar putea fi reinspirat. Reinspirarea aerului expirat timp de mai mult de câteva minute poate, în anumite circumstanțe, să ducă la sufocare. Acest lucru este valabil pentru cele mai multe modele de dispozitive CPAP sau de dispozitiv de nivel dublu.

AVERTISMENTE GENERALE

- Urmați toate precauțiile în cazul utilizării suplimentare de oxigen.
- În cazul nefuncționării dispozitivului CPAP sau a dispozitivului de nivel dublu, se va opri orice flux de oxigen, pentru ca oxigenul neutilizat să nu se acumuleze în carcasa acestuia și să creeze pericolul unui incendiu.
- Oxigenul întreține arderea. Oxigenul nu trebuie utilizat în timp ce fumați sau în prezența unei flăcări deschise. Se va utiliza oxigen doar în camere bine aerisite.
- La un debit fix al fluxului de oxigen suplimentar, concentrația oxigenului inspirat variază în funcție de setările de presiune, de modul de respirație al pacientului, de mască, de selectarea interfeței și de rata de pierdere. Acest avertisment este valabil pentru majoritatea tipurilor de dispozitive CPAP sau de dispozitive de nivel dublu.
- Specificațiile tehnice ale măștii sunt puse la dispoziția clinicianului dumneavoastră pentru ca acesta să poată verifica dacă acestea sunt compatibile cu dispozitivul CPAP sau cu dispozitivul de nivel dublu. În cazul utilizării măștii în afara specificațiilor sau împreună cu dispozitive incompatibile, etanșeitatea și confortul măștii vor avea de suferit și nu se va atinge nivelul optim al tratamentului, iar pierderile sau modificarea ratei de pierdere pot afecta funcționarea dispozitivului CPAP sau a dispozitivului de nivel dublu.
- Renunțați la utilizarea acestei măști dacă aveți ORICE reacții adverse legate de utilizarea măștii și consultați-vă medicul sau

AVERTISMENTE GENERALE

specialistul în tulburări de somn.

- Utilizarea măștii poate provoca dureri ale dinților, gingiilor sau maxilarului sau poate agrava o afecțiune stomatologică existentă. Dacă apar simptome, consultați-vă medicul sau stomatologul.
- La fel ca în cazul tuturor măștilor, este posibil să reinhalați aerul la presiuni joase ale dispozitivului CPAP.
- Consultați manualul dispozitivului CPAP sau al dispozitivului de nivel dublu pentru detalii referitoare la setări și funcționare.
- Îndepărtați întregul ambalaj înainte de a utiliza masca.
- Masca se va utiliza sub supraveghere calificată în cazul pacienților care se află în imposibilitatea de a-și îndepărta singuri masca.
- Această mască nu este destinată utilizării la pacienții cu reflexe laringiene slabe sau cu alte afecțiuni ce implică o predispoziție la aspirare în cazul regurgitației sau al vomei.
- Evitați conectarea produselor din PVC flexibile (ex. tuburi din PVC) direct la orice piesă a măștii. Produsele din PVC flexibile conțin elemente care pot deteriora materialele din care este fabricată masca și pot provoca crăparea sau degradarea componentelor.
- Măștile nazale CPAP din seria N20 nu sunt destinate utilizării simultan cu tratamente administrate cu ajutorul nebulizatorului pe calea de circulație a aerului a măștii/tubului.
- Masca este prevăzută cu o funcție de siguranță cu orificiu de evacuare pentru a permite respirația normală. Masca nu va fi

AVERTISMENTE GENERALE


purtată dacă această funcție de siguranță este deteriorată sau lipsește.

Notă: Orice incidente grave care au loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie să fie raportate ResMed și autorităților competente din țara dumneavoastră.

Specificații tehnice

Curbă de presiune-debit

Masca conține o supapă pasivă pentru a preveni reinhalarea. Ca urmare a variațiilor din fabricație, este posibil ca debitul prin orificiile de ventilație să difere.

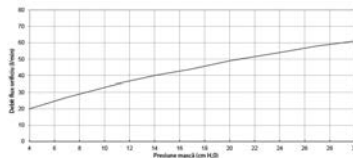

Presiune (cm H ₂ O)	Debit (l/min)
4	20
7	27
11	35
14	40
17	44
20	49
24	54
27	58
30	61

	AirFit N20	AirTouch N20
Presiune de terapie	de la 4 la 30 cm H ₂ O	de la 4 la 30 cm H ₂ O
Spațiu mort: Spațiul mort fiziologic este volumul liber al măștii la capătul articulației. La utilizarea pernărilor mari, aceasta este		

	AirFit N20 103 ml (mare)	AirTouch N20 103 ml (mare)
Rezistență: Scădere de presiune măsurată (nominală)		
la 50 l/min	0,3 cm H ₂ O	0,4 cm H ₂ O
la 100 l/min	1,3 cm H ₂ O	1,4 cm H ₂ O
Zgomote: VALORI DECLARATE ALE EMISIILOR DE ZGOMOT CONȚINÂND DOUĂ CIFRE în conformitate cu standardul ISO 4871. Nivelul de putere acustică ponderat A și nivelul de presiune sonoră ponderat A ale măștii, la o distanță de 1 m, cu o marjă de eroare de 3 dBA, sunt:		
Nivel putere	24 dBA	24 dBA
Nivel presiune	16 dBA	16 dBA
Dimensiuni brute: Mască asamblată complet cu ansamblu de tub scurt și articulație, fără ham (L x l x H)		
	339 mm x 291 mm x 162 mm	339 mm x 291 mm x 170 mm
Condiții de mediu		
Temperatura de operare: de la 5°C la 40°C		
Umiditatea de operare: de la 15% la 95% RH fără condensare		
Temperatura de depozitare și transport: de la -20°C la +60°C		
Umiditatea de depozitare și de transport: până la 95% RH fără condensare		
Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP)		
Magneții cu care este prevăzută această mască respectă orientările ICNIRP pentru utilizarea de către populație.		

Durata de viață

Durata de viață a sistemului de mască depinde de intensitatea utilizării, de întreținere și de condițiile de mediu în care masca este utilizată sau depozitată. Deoarece acest sistem de mască și componentele sale sunt modulare, se recomandă ca utilizatorul să îl mențină și să îl verifice periodic și să înlocuiască sistemul de mască sau orice componente dacă este cazul sau conform „criteriilor vizuale pentru verificarea produsului” din secțiunea „Curățarea măștii acasă” a prezentului ghid.

Opțiuni de configurare a măștii

Pentru AirSense, AirCurve sau S9: Selectați „Pillows” (Pernițe).
Pentru alte dispozitive: Selectați „SWIFT” (dacă este disponibil),
în caz contrar, selectați „MIRAGE” ca opțiune pentru mască.

Dispozitive compatibile: Pentru o listă completă a dispozitivelor compatibile cu această mască, consultați Lista de compatibilitate măști/dispozitiv la adresa [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks). În cazul în care nu aveți acces la Internet, vă rugăm să contactați reprezentantul ResMed.

Notă: Producătorul își rezervă dreptul de a modifica aceste specificații fără notificare.

Reînnouiți masca pentru fiecare pacient

Reînnouiți această mască atunci când o utilizați pentru fiecare pacient. Instrucțiunile de reprocesare sunt disponibile la adresa [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

Depozitare

Asigurați-vă că masca este complet curățată și uscată înainte de a o depozita pentru o durată mai mare de timp. Păstrați masca într-un loc uscat, ferit de razele directe ale soarelui.

Eliminare

Această mască și ambalajul nu conțin substanțe periculoase și pot fi eliminate împreună cu deșeurile dumneavoastră menajere normale.

Simboluri

Următoarele simboluri pot apărea pe produsul sau ambalajul dumneavoastră:



Importator



Dispozitiv medical



Mască nazală



Reglaj dispozitiv - Pillows
(Pernițe)

LATEX?

Nu este fabricat din
latex de cauciuc natural



A se curăța numai cu
șervețele fără alcool



A nu se scufunda în
lichide



Mărime - mică



Mărime - medie



Mărime - mare

Consultați glosarul de simboluri la adresa [ResMed.com/symbols](https://www.ResMed.com/symbols).

Garanția consumatorului

ResMed recunoaște toate drepturile consumatorului acordate în temeiul Directivei UE 1999/44/CE și al legilor naționale respective din UE pentru produsele vândute în Uniunea Europeană.



MANUFACTURER

ResMed Pty Ltd

1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

See [ResMed.com](https://www.ResMed.com) for other ResMed locations worldwide. AirFit, AirSense and AirCurve are trademarks and/or registered trademarks of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see [ResMed.com/ip](https://www.ResMed.com/ip). © 2020 ResMed. 638260/1 2020-07

[ResMed.com](https://www.ResMed.com)

CE 0123



638260