




NIMBO POSTERIOR WALKER

Cod de produs:

KA1200-2GCR, KA1200-2GKB, KA1200-2GWP,
KA2200-2GCR, KA2200-2GKB, KA2200-2GWP,
KA3200-2GCR, KA3200-2GKB, KA3200-2GWP,
KA4200-2GCR, KA4200-2GKB, KA4200-2GWP,
KA5200-2GEB

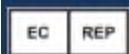

Reprezentant Autorizat UE

Drive Medical LTD

Ainley's Industrial Estate


Eiland, West Yorkshire,

United Kingdom HX5 9JP

www.inspiredbydrive.com


Instrucțiuni pentru utilizator

1. Scoateți Nimbo din cutie.
2. Pentru a desfășura Nimbo, trageți mânerul și bara transversală în direcții opuse. Continuați să desfășurați până când pini de blocare ("push pins") se fixează cu un „clic”.
3. Pentru a instala picioarele, potriviți numerele picioarelor cu numerele corespunzătoare de pe cadru. Apăsăți pe pini și alunecați picioarele în cadru. Când sunt blocate în poziție, pini se vor fixa cu un „clic” prin cadru.

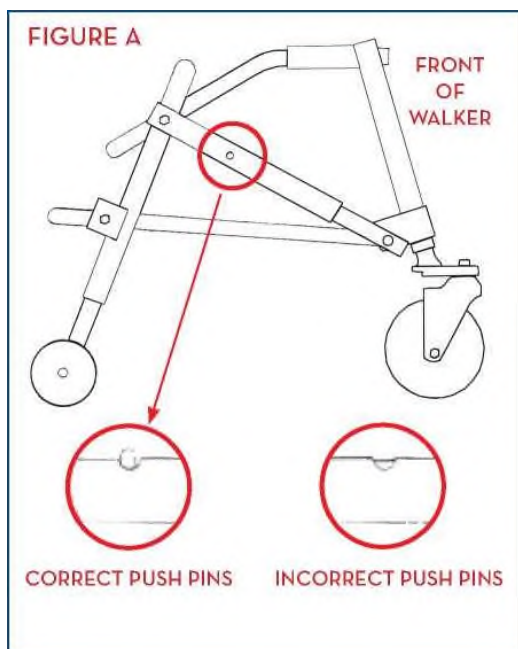


Informații pentru utilizator

1. Ridicați și poziționați butonul (A) pentru a seta roțile din față în poziția pivotantă sau blocată

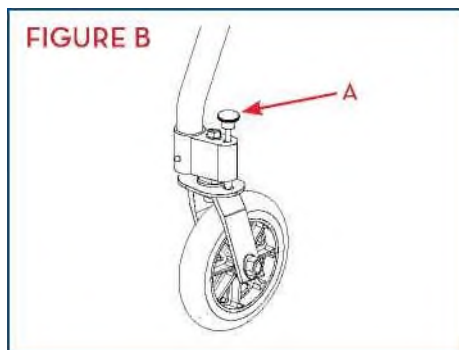

2. Pentru a plia Nimbo, poziționați-l cu fața către capătul deschis, apăsați pe pini, înclinați walker-ul astfel încât să stea sprijinit doar pe picioarele din spate și împingeți picioarele din față către picioarele din spate.
3. Pentru a depăși funcția unidirecțională a roților din spate, ridicați pinul din aluminiu și introduceți-l în suportul de depășire (override bracket).

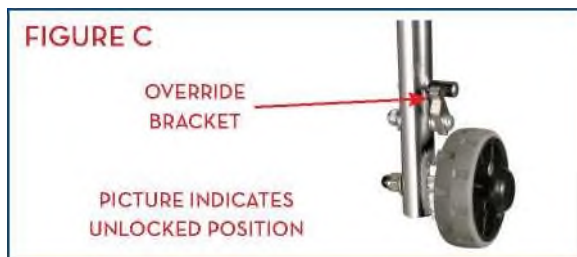

Întreținere și îngrijire

1. Inspectați periodic Nimbo. Strângeți piulițele și șuruburile după cum este necesar. Dacă produsul necesită service sau piese de schimb, contactați un dealer autorizat Drive.
2. Pentru a curăța Nimbo, folosiți apă caldă cu un detergent delicat. Ștergeți cu o cârpă moale și uscată.

Garanție Limitată pe Viață

Produsul dumneavoastră marca **Inspired by Drive** este garantat a fi lipsit de defecte de materiale și de fabricație pe durata de viață a produsului, pentru achizitorul inițial.

Acest dispozitiv a fost construit conform unor standarde riguroase și inspectat cu atenție înainte de expediere.

Această **Garanție Limitată pe Viață** reprezintă o expresie a încrederii noastre în materialele și calitatea execuției produselor noastre și o asigurare pentru consumator că se poate baza pe ani de utilizare sigură și fiabilă.

Această garanție **nu acoperă defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijența proprietarului**, precum și uzura normală. Garanția nu se extinde la componentele nedurabile, cum ar fi accesoriile din cauciuc, roțile și mânerele, care se uzează în mod normal și necesită înlocuire periodică.

Dacă aveți întrebări legate de dispozitivul **Inspired by**

Drive sau de această garanție, vă rugăm să contactați un dealer autorizat **Inspired by Drive**.

2017 Medical Depot, Inc. Toate drepturile rezervate.

Drive DeVilbiss Healthcare

99 Seaview Boulevard, Port Washington, N.Y. 11050,
SUA

Fabricat în China