

## **Saltea Antiescare Ricant SY200**



**Adapt Medical**

**Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, Bucuresti**  
**Tele: 031 828 8200; ; info@adapt.ro**

## Informații pentru utilizator

### Un sistem antidecubit alternant de noua generație

Sistemul anti-decubit alternant al saltelei anti-decubit RIKANT SY-200 este destinat prevenirii decubitelui (răni de la somnul excesiv) prima etapă. Sistemul este recomandat pentru tratament pe termen lung la domiciliu. Are scopul de a reduce presiunea continuă asupra aceluiași puncte de sprijin ale corpului. Alternarea punctelor de susținere asigură o mai bună circulație a sângelui și o oxigenare a țesuturilor (aprovizionarea cu oxigen a țesutului) în aceste zone, reducând astfel riscul de ulcer de decubit.

Aparatul este format dintr- **o pompă** cu regulator de presiune și **o saltea** acoperită cu buzunare de aer trapezoidale.

Salteaua este concepută pentru uz casnic, ușor de montat datorită unei piese extinse care poate fi plasată sub salteaua principală.

Pompa permite reglarea presiunii în funcție de greutatea pacientului și este echipată cu carlige care permit atașarea ușoară la pat.

## Descrierea și scopul produsului

**Salteaua antiescare SY200 are o eficiență superioară în prevenirea și tratamentul escarelor de presiune (decubit).**

**Salteaua antiescare SY 200** este compusă din **pompă și saltea**, asigurând o eficiență superioară în prevenirea și tratamentul escarelor datorită **sistemului de reglare electrică al presiunii în funcție de greutatea bolnavului**.

Noul Model, aduce o pompă cu **regulator electric** care reduce zgomotul și vibrațiile, sporește eficiența, fiind și un model mai rezistent în timp. Noul model de saltea beneficiază de o metodă inovativă de îmbinare a celulelor care-i cresc rezistența.

Această saltea antiescare are o eficiență crescută atât pentru prevenirea escarelor cât și pentru tratarea escarelor existente.

Folosirea saltelei antiescare, crește considerabil șansa de vindecare a unei răni deja aparute, micșorând de asemenea și durata ei de tratare. Cu ajutorul saltelei antiescare se înlătură cauza apariției unei răni, fiind „primul tratament” indicat și în cazul escarelor deja aparute.

Salteaua antiescare SY200 reduce presiunea pe care o exercită corpul unui bolnav imobilizat, presiune care duce la apariția escarelor. Folosirea acestei salte reduce timpul de vindecare al rănilor existente și previne apariția altor răni noi. Prin pompa de presiune alternativă care umflă și dezumflă alternativ

celulele saltelei, corpul bolnavului este degrevat în permanentă de presiunea care duce la apariția escarelor. Aceasta umflare și dezumflare alternativă a saltelei face și un micromasaj la nivelul pielii care aduce o mai bună oxigenarea a pielii și o mai bună circulație a sângelui.

Salteaua antiescare preia 70% din rolul întoarcerii bolnavului la fiecare oră, de pe o parte pe alta, lucru uneori foarte greu de realizat mai ales în timpul nopții.

**Salteaua Antiescare** pe presiune alternativă dispune de un aparat numit pompa sau compresor și o saltea. Compresorul trebuie să funcționeze în permanentă, atâta timp cât timp bolnavul stă pe saltea, pentru a asigura umflarea și dezumflarea alternativă a celulelor. Acest fapt asigură efectul antiescare. Compresorul este legat de saltea prin două furtunase și se așază sub patul bolnavului sau agatat de capatul patului.

Acest produs este unul de igienă personală (conform art 16. lit. e / ordonanță 34/2014).

ACESTE PRODUSE INTRA IN CATEGORIA PRODUSELOR DE IGIENA PERSONALA CARE NU SE POT RETURNA DUPA DESIGILARE!

### **Cum funcționează salteaua antiescare SY200?**

**Salteaua antiescare** este absolut necesară pentru pacienții imobilizați la pat. În România există peste 1 milion de persoane cu răni cronice, dintre care cele mai frecvente sunt escarele.

În cazul unei persoane imobilizate există un risc foarte mare de apariție al escarelor. Corpul bolnavului imobilizat, în contact cu patul, face o presiune permanentă, împingând osul spre piele până când se deschide o rană. Folosirea acestei salte antiescare degreuează corpul de presiune, ajutând la prevenirea acestor răni, numite și răni de presiune. Chiar și în cazul în care bolnavul care are deja răni, salteaua antiescare este „**primul tratament**”, fiind absolut necesară pentru a înlătura cauza ranilor și pentru a preveni apariția altor răni. Chiar dacă se folosesc pansamente speciale pentru tratarea ranilor, fără înlăturarea cauzei apariției escarelor cu ajutorul unei salte antiescare, vindecarea devine greoaie. Salteaua antiescare scurtează durata de vindecare a unei rani și previne apariția altor răni. Salteaua antiescare preia 70% din rolul întoarcerii de pe o parte pe alta a bolnavilor, manevra recomandată a se realiza din oră în oră. În puține situații există posibilitatea de a întoarce bolnavul atât de des, de aceea folosirea acestei salte antiescare preia o mare parte din acest rol, aducând degrevarea de presiune.

Pompa saltelei antiescare creează o presiune alternativă în saltea, astfel încât tot timpul un rand de celule va fi umflat și unul dezumflat. La un interval de aproximativ 10 minute, presiunea se schimbă, astfel încât tot corpul bolnavului să fie degrevat de presiune. Acolo unde celula este dezumflată, corpul bolnavului este ca și cum ar fi suspendat în aer, nu mai face presiune.

Pielea bolnavului imobilizat, în condiții de presare, fricțiune, umiditate, temperatură, incontinență, este afectată, circuitul normal al sângelui fiind întrerupt creându-se astfel un mediu propice dezvoltării ranilor. Sistemul antiescare, prin schimbarea de presiune din celulele saltelei, realizează și un masaj ușor care îmbunătățește circulația sangvină la nivelul pielii și care asigură o mai bună oxigenare a tesuturilor.

Salteaua antiescare ajută la reducerea durerilor și la îngrijirea la domiciliu pe termen lung a persoanelor imobilizate.

### Caracteristici tehnice

| Producător                | Rikant SRL                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentare electrică      | 220 V ~ 50 Hz                                                      |
| Debitul de aer            | 5 litri/minut                                                      |
| Presiune                  | 40 MMHG – 120 MMHG                                                 |
| Durata unui ciclu         | 12 minute                                                          |
| Dimensiunea compresorului | 245 mm / 112 mm / 80 mm                                            |
| Greutatea compresorului   | 1,4 kg                                                             |
| Dimensiunea saltelei      | L- 200 cm / L - 90 cm / H - 6,5 cm                                 |
| Grosimea acoperirii PVC   | 30 de microni                                                      |
| Greutatea saltelei        | 2 kg                                                               |
| Scop:                     | Potrivit pentru pacienții cu greutatea cuprinsă între 50 și 110 kg |

| Dimensiuni                              |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Înălțimea minimă a suportului           | 850 mm   |
| Înălțimea maximă a suportului           | 17500 mm |
| Lățimea minimă a bazei reglabile        | 590 mm   |
| Lățimea maximă a bazei reglabile        | 1100 mm  |
| Lungime                                 | 1120 mm  |
| Înălțimea minimă de la podea            | 60 mm    |
| Greutatea produsului                    | 45 kg    |
| Greutatea maximă a utilizatorului       | 180 kg   |
| Greutatea de ridicare la sarcină maximă | 225 kg   |

**Atenție:** Transportul produsului trebuie efectuat numai în conformitate cu cerințele de ambalare și siguranță.

**Atenție:** despachetarea trebuie efectuată cu atenție, iar produsul trebuie să fie utilizat numai conform destinației, în conformitate cu măsurile de siguranță.

**Atenție:** în cazul unei probleme, atunci când producătorul trebuie contactat, trebuie comunicate detaliile de pe eticheta produsului.

## Curățare și întreținere

Pentru a curăța salteaua cu aer, utilizați detergenți neutri, cârpe umede sau dezinfectanți de uz general. Nu folosiți materiale abrazive deoarece acestea vor deteriora salteaua și pompa. Curățați pompa cu o cârpă ușor umedă, FĂRĂ detergenți.

**ATENȚIE :** Toate operațiunile de curățare a sistemului trebuie efectuate cu pompa deconectată de la sursa de alimentare.

**Condiții de funcționare :** 10 °C până la 35 °C , umiditate: 20 până la 80%

**Condiții de depozitare și transport :** -15 °C până la 50 °C, umiditate: 10 până la 90%

## Garanție

Produsele sunt garantate împotriva defectelor de materiale și manoperă pentru o perioadă de **doi ani (24 de luni) compresorul de la data cumpararii, si salteaua gonflabila un an de la data achiziției.** de la data achiziției. În timpul perioadei de garanție, dacă produsul se dovedește a fi nefuncțional, producătorul îl poate înlocui.

### **Garanția nu include:**

Întreținerea periodică, inspecția, repararea sau înlocuirea pieselor din cauza uzurii normale a produsului.

Costurile și riscurile asociate cu transportul produsului.

Deteriorarea dispozitivului din cauza instalării necorespunzătoare, a utilizării necorespunzătoare sau a utilizării care nu este strict specificată în acest manual.

Daune rezultate în urma reparațiilor efectuate în ateliere neautorizate.

În cazul unei probleme, utilizatorul trebuie să contacteze imediat producătorul, să descrie defecțiunea în detaliu și să raporteze detaliile înscrise pe eticheta dispozitivului.

În timpul perioadei de garanție, producătorul trebuie să efectueze direct o inspecție tehnică pentru a determina dacă defecțiunea se datorează unui defect de fabricație sau altor cauze specificate în garanție sau dacă defecțiunea este rezultatul unor cauze care exclud acoperirea garanției.

**Blud. Iuliu Maniu, nr.7-11, sec. 6, Bucuresti**



**Sună-ne la :031 828 8200**

**Trimite-ne un e-mail la [info@adapt.ro](mailto:info@adapt.ro)**