

Saltea Antiescara Italia Ricant SY400



Adapt Medical

Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, Bucuresti
Tele: 031 828 8200; ; info@adapt.ro

Informații pentru utilizator

Un sistem antidecubit alternant de noua generație

Sistemul anti-decubit alternant al saltelei anti-decubit Ricant SY400 este destinat prevenirii decubitului (răni de la somnul excesiv) prima etapă. Sistemul este recomandat pentru tratament pe termen lung la domiciliu. Are scopul de a reduce presiunea continuă asupra aceluiași puncte de sprijin ale corpului. Alternarea punctelor de susținere asigură o mai bună circulație a sângelui și o oxigenare a țesuturilor (aprovizionarea cu oxigen a țesutului) în aceste zone, reducând astfel riscul de ulcer de decubit.

Aparatul este format dintr- **o pompă** cu regulator de presiune și **o saltea** acoperită cu buzunare de aer trapezoidale.

Salteaua este concepută pentru uz casnic, ușor de montat datorită unei piese extinse care poate fi plasată sub salteaua principală.

Pompa permite reglarea presiunii în funcție de greutatea pacientului și este echipată cu carlige care permit atașarea ușoară la pat.

Descriere

Salteaua antiescare Ricant SY400, calitate superioară, adresată persoanelor cu greutatea de până la 140 kg, este formată dintr-o pompă cu presiune alternativă și o saltea multicameră – cilindrică, oferind o eficiență sporită în prevenirea și tratamentul escarelor de presiune. Acest tip de saltea permite înlocuirea separată a cilindrilor din saltea, dacă este cazul.

Salteaua antiescare este indicată în îngrijirea pe termen lung a tuturor persoanelor imobilizate.

Sistemul antiescare, reduce presiunea de decubit exercitată în permanență de către corpul persoanelor imobilizate, realizând un masaj ușor care îmbunătățește circulația sanguină la nivelul pielii și care asigură o mai bună oxigenare a țesuturilor.

Această saltea este eficientă atât pentru prevenirea escarelor cât și pentru tratarea escarelor existente.

Folosirea saltelei antiescare, crește considerabil șansa de vindecare a unei escare deja apărute, micșorând de asemenea și durata de ei de tratare.

Eficiența depinde și de organismul fiecărui bolnav, precum și de îngrijirea corectă a acestuia.

AVANTAJE:

- este indicată pentru persoane de până la **140 kg**
- are o putere mare a presiunii alternative, sporind eficiența
- pompa acestei salte asigură **reglarea corectă a presiunii în funcție de numărul de kilograme ale fiecărui bolnav în parte**
- are 1 husă care învelește salteaua
- produsul este înregistrat și aprobat de către Ministerul Italian al Sănătății precum și de

Ministerul Sanatatii al Romaniei.

- produsul este testat si aprobat in conformitate cu Directiva Europeana 93/42/ECC pentru “dispozitive medicale”
- acest produs este unul de igiena personala (conform art 16. lit. e / ordonanta 34/2014).
-

Sistemul (cod SY 400) este compus din pompa (– durata ciclului 8 min; si saltea.

Dimensiune: 200(L) x 90(l) x 11 (H) cm.

Garantie: 24 luni.

Salteaua antiescare pe presiune alternativa dispune de un aparat numit pompa sau compresor si o saltea. Compresorul trebuie sa functioneze in permanenta, atata timp cat timp bolnavul sta pe saltea, pentru a asigura umflarea si desumflarea alternativa a celulelor. Acest fapt asigura efectul antiescare. Compresorul este legat de saltea prin doua furtunase si se aseaza sub patul bolnavului sau agatat de capatul patului.



Specificatii

Caracteristici generale

Tip produs	Saltea medicala
Destinat pentru	Recuperare Tratament
Tip montare	Podea
Beneficii	Prevenirea escarelor de decubit
Functii	Multifunctional
Utilizare	Interior Exterior
Continut pachet	1 x pompa electrica 1 Saltea antiescare tip fagure 1 x Husa de protectie
Material	Material non-toxic (PVC)
Inaltimea maxima persoana	200 cm
Greutate maxima suportata	140 Kg
Culoare	Albastru

Dimensiuni:

Lungime	200 cm
Latime	90 cm
Inaltime	11 cm
Greutate	5 Kg

Acest produs este unul de igiena personala (conform art 16. lit. e / ordonanta 34/2014).

ACESTE PRODUSE INTRA IN CATEGORIA PRODUSELOR DE IGIENA PERSONALA CARE NU SE POT RETURNA DUPA DESIGILARE!

Atenție: Transportul produsului trebuie efectuat numai în conformitate cu cerințele de ambalare și siguranță.

Atenție: despachetarea trebuie efectuată cu atenție, iar produsul trebuie să fie utilizat numai conform destinației, în conformitate cu măsurile de siguranță.

Atenție: în cazul unei probleme, atunci când producătorul trebuie contactat, trebuie comunicate detaliile de pe eticheta produsului.

Curățare și întreținere

Pentru a curăța salteaua cu aer, utilizați detergenți neutri, cârpe umede sau dezinfectanți de uz general. Nu folosiți materiale abrazive deoarece acestea vor deteriora salteaua și pompa. Curățați pompa cu o cârpă ușor umedă, FĂRĂ detergenți.

ATENȚIE : Toate operațiunile de curățare a sistemului trebuie efectuate cu pompa deconectată de la sursa de alimentare.

Condiții de funcționare : 10 °C până la 35 °C , umiditate: 20 până la 80%

Condiții de depozitare și transport : -15 °C până la 50 °C, umiditate: 10 până la 90%

Garanție

Produsele sunt garantate împotriva defectelor de materiale și manoperă pentru o perioadă de **doi ani (24 de luni) compresorul de la data cumpararii, si salteaua gonflabila un an de la data achiziției.** de la data achiziției. În timpul perioadei de garanție, dacă produsul se dovedește a fi nefuncțional, producătorul îl poate înlocui.

Garanția nu include:

Întreținerea periodică, inspecția, repararea sau înlocuirea pieselor din cauza uzurii normale a produsului.

Costurile și riscurile asociate cu transportul produsului.

Deteriorarea dispozitivului din cauza instalării necorespunzătoare, a utilizării necorespunzătoare sau a utilizării care nu este strict specificată în acest manual.

Daune rezultate în urma reparațiilor efectuate în ateliere neautorizate.

În cazul unei probleme, utilizatorul trebuie să contacteze imediat producătorul, să descrie defecțiunea în detaliu și să raporteze detaliile înscrise pe eticheta dispozitivului.

În timpul perioadei de garanție, producătorul trebuie să efectueze direct o inspecție tehnică pentru a determina dacă defecțiunea se datorează unui defect de fabricație sau altor cauze specificate în garanție sau dacă defecțiunea este rezultatul unor cauze care exclud acoperirea garanției.

Blud. Iuliu Maniu, nr.7-11, sec. 6, Bucuresti



Sună-ne la :031 828 8200

Trimite-ne un e-mail la info@adapt.ro