

PROMOVEAZĂ GRIJA PENTRU LUME

DRAGON

Adresa: Chenlong Building,N0.1, Jingang Road,
Yangshe Town,Zhangjiagang City

Jiangsu Province China

Tel: +86-0512-88831198

Fax: +86-0512-58672811

E-mail: simon@dragon-iec.com

<http://www.dragon-iec.com>



DESCRIEREA PRODUSULUI

CĂRUCIOR MOTORIZAT DE
URCAT / COBORÂT SCĂRILE
ST003A

VEDERE GRAFICĂ

1. Panou de control
2. Cu centură de siguranță
3. Mâner spate
4. Structură cu șenile
5. Controler
6. Motor
7. Rulou spate cu frână
8. Roți universale
9. Suport pentru picioare
10. Mâner frontal
11. Baterie Li-ion
12. Centură de siguranță pentru corp
13. Cotieră
14. Bară de ridicare



MODEL	ST003A
Dimensiunea produsului (L*W*H)	80*55*105/163 cm
Dimensiunea pliată (L*W*H)	105*55*28 cm
Dimensiunea amabalat (L*W*H)	111*60*30 cm
Încărcătură maximă	200 kg
N.W.	30 kg
G.W.	45 kg
Ajustarea înălțimii	105 cm până la 163 cm/ 3 trepte de ajustare
Adâncime totală	204 cm
Lățime totală	46 cm
Dimensiune scaun	lățime 40 cm* adâncime 50 cm * înălțime de la podea 50 cm
Dimensiune suport scaun	lățime 38 cm*adâncime 20 cm*înălțime de la podea 18 cm
Putere motor	120 W
Tensiune de ieșire motor	20 – 29.4 V
Curent motor	13.9 A
Tensiune baterie	24 V
Durata de viața	3 – 5 ani
Unghiul șenilei	Unghiul șenilei după reglarea spătarului în trei poziții, potrivit pentru diferite niveluri/etaje.

CARACTERISTICI TEHNICE

1. Pentru spitale, centre de urgență, pompieri, ambulanțe de urgență, precum și pentru transportul familiei de bunuri pe scări.
2. Căruciorul/scaunul pentru scări este utilizat în principal pentru transferul pacienților în clădiri înalte, pe scări, sus și jos.
3. Sistem de alunecare extra-lat pentru un transfer mai sigur și mai ușor.
4. Materialele căruciorului pentru scări sunt realizate din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
5. Dimensiuni roți cărucior pentru scări: 125/100 mm; roată spate cu frână.
6. Sistemul de alunecare este reglabil; utilizatorul poate ajusta strângerea.
7. Bara de ridicare cu trei poziții ajută operatori de orice înălțime să mute căruciorul pe scări.
8. Două culori populare disponibile:
 - A. albastru + negru (opțional)
 - B. galben + negru
9. Suport pentru cap, stâlp IV, suport pentru oxigen – opționale.

PREGĂTIREA CĂRUCIORULUI MOTORIZAT – VERIFICAREA BATERIEI

Verificarea încărcării bateriei:

1. Fie pe căruciorul/scările motorizate, fie după ce bateria a fost scoasă, rotiți cheia bateriei complet în sensul acelor de ceasornic.



4. Conectați cablul de încărcare și încărcați bateria.



2. Apăsați butonul roșu; luminile verzi se vor aprinde dacă bateria are încărcare:

- 1 lumină = 30% încărcare
- 2 lumini = 50% încărcare
- 3 lumini = 100% încărcare
- 4 lumini = mai puțin de 10%



5. Când bateria este încărcată, scoateți cablul de încărcare și înșurubați strâns cu degetul în sensul acelor de ceasornic.



Încărcarea bateriei (pe cărucior/scările motorizate):

3. Deșurubați în sens invers acelor de ceasornic cablul de conectare al bateriei.




Folosirea căruciorului motorizat pentru urcat scări

Pregătirea căruciorului motorizat pentru urcat scări

Scoateți căruciorul motorizat pentru urcat scări din locul de depozitare și desfaceți centura în timp ce țineți căruciorul pliat.



7. Trageți scaunul căruciorului motorizat pentru urcat scări în jos, către podea, și ascultați un clic când scaunul se blochează în poziție.

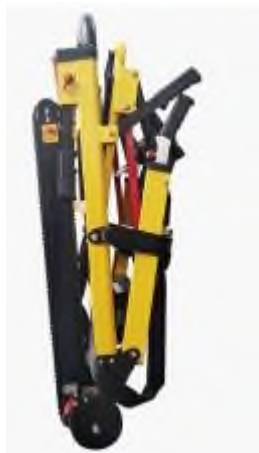

Extinderea suportului pentru picioare

8. Trageți ferm suportul pentru picioare în jos până în poziția de utilizare.



Extinderea mânerului de operare

9. Apăsați bara paralelă în jos, ridicați mânerul și lăsați-l să se blocheze în poziție. În funcție de înălțimea operatorului, pot fi selectate 3 niveluri de înălțime.



Extinderea șenilelor

10. Împingeți bara inferioară cu săgeata albă înainte, în direcția săgeții. Aceasta va elibera mecanismul de blocare al șenilelor.



11. Trageți bara superioară a șenilelor înapoi până când șenilele se angajează în a doua poziție de blocare.



Pregătirea căruciorului motorizat pentru urcat scări

Eliberarea șenilelor

12. Apăsăți ferm clapeta gri de deasupra clapetei roșii pentru a elibera șenila.



Pliarea căruciorului motorizat pentru urcat scări

13. Apăsăți bara de blocare care are săgeata neagră cu mâna.

14. În timp ce bara este apăsată, împingeți mânerul departe de corp și căruciorul motorizat va începe să se plieze.



Aplicarea frânelor

15. Apăsăți ferm cu piciorul clapeta roșie a mecanismului de frânare pentru a angaja frâna.



Eliberarea frânelor

16. Apăsați ferm clapeta gri pentru a elibera frâna.



Folosirea suportului pentru cap

17. Dacă este necesar să susțineți capul persoanei evacuate în timpul transportului, se poate folosi suportul pentru cap reglabil pe înălțime cu Velcro pentru a-l fixa.



Controlul motorului

18. Rotiți cheia complet în sensul acelor de ceasornic pentru a porni motorul. Se va aprinde o lumină roșie în fața bateriei.



Aplicarea frânelor

19. Apăsați butonul roșu. Când lumina roșie este aprinsă, motorul poate funcționa.

20. Apăsați butonul „sus” pentru a deplasa căruciorul motorizat înapoi.

21. Apăsați butonul „jos” pentru a deplasa căruciorul motorizat înainte.



CURĂȚAREA

Curățați căruciorul motorizat pentru urcat scări și componentele sale cu o cârpă curată sau o perie moale și apă caldă cu săpun. Clătiți cu apă caldă și lăsați să se usuce natural.

Nu curățați cu produse care conțin înălbitor sau fenol. Dacă este necesar, se poate folosi o perie cu peri tari.



AVERTISMENT

Nu lăsați niciodată o persoană evacuată nesupravegheată în căruciorul motorizat pentru urcat scări și folosiți întotdeauna centurile de siguranță.

AVERTISMENT

Evitați schimbarea poziției brusc, deoarece acest lucru poate provoca rănirea persoanei evacuate. Susțineți căruciorul motorizat în timp ce reglați mânerul.

AVERTISMENT

Întreținerea necorespunzătoare poate provoca accidente. Întrețineți căruciorul motorizat doar conform scopului descris în acest manual.

AVERTISMENT

Este strict interzis să plasați acumulatorul în apă, să îl loviți, să îl scurcircuitați sau să îl expuneți la temperaturi ridicate. Dacă nu este folosit mai mult de 3 luni, trebuie să îl încărcați timp de 1 oră.



PROFILUL COMPANIEI

Despre noi

Dragon Industry (ZJG) Co., Ltd a fost înființată cu scopul de a oferi cel mai înalt nivel de calitate și servicii pe care această piață le-a cunoscut vreodată. Este un furnizor de top de produse medicale și pentru îngrijire, deserving toate segmentele pieței de sănătate, inclusiv spitale și clinici, cămine de bătrâni și facilități de îngrijire pe termen lung, cabinete medicale private și altele.

Ne specializăm în:

Seria pentru prim ajutor: Avem peste 100 de tipuri de targă de ambulanță, targă pentru scări, targă tip lingură, targă tip coș, targă militară, atele de tracțiune, pături de urgență etc.

Echipamente pentru spitale: Paturi de spital, mese de operație, suport pentru perfuzii, scaune pentru așteptare, mese de examinare, cărucioare medicale etc.

Scopul nostru: Prețuri rezonabile, calitate înaltă, livrare la timp, cele mai bune servicii – pentru că viețile depind de acestea.