

**PROMOVEAZĂ
GRIJA PENTRU
LUME**



Adresa: Chenlong Building NO.1, Jingang
Road
Yangshe Town, Zhangjiagang City
Jiangsu Province, China
Tel: +86-0512-88831198
Fax: +86-0512-58672811
E-mail: simon@dragon-iec.com
<http://www.dragon-iec.com>



DESCRIEREA PRODUSULUI

**CĂRUȚOR MOTORIZAT DE URCAT / COBORĂȚ
SCĂRI**

PRODUCT MODEL

DW-SW01

VEDERE GRAFICĂ

1. Panou de control

Cutie din plastic turnat, cu Smart touch.



2. Scaun stabil din aluminiu cu pernă detașabilă Confort superior pentru pacient; perna poate fi îndepărtată în funcție de vreme.

3. Roți față pivotante de 5 inci Permit mobilitate similară unui scaun cu roțile.



4. Mâner superior de control Poziționat ergonomic pentru control optim al operatorului.

5. Sistem motorizat de TREAD pentru scări Transportă pacientul în sus și în jos pe scări.

6. Roți de 5 inci Ajută la deplasarea pe sol.



MODEL	DW-SW02
Dimensiunea produsului (L*W*H)	53*80*113 cm
Dimensiunea pliată (L*W*H)	113*53*37 cm
Dimensiunea ambalat (L*W*H)	120*60*35 cm
Încărcătură maximă	200 kg
N.W.	35 kg
G.W.	51 kg
Ajustarea înălțimii	113 cm până la 160 cm/ 3 trepte de ajustare
Adâncime totală	112 cm
Lățime totală	48 cm
Dimensiune scaun	lățime 41 cm* adâncime 48 cm * înălțime de la podea 50 cm
Dimensiune suport scaun	lățime 38 cm*adâncime 20 cm*înălțime de la podea 18 cm
Putere motor	120 W
Tensiune de ieșire motor	20 – 29.4 V
Tensiune adaptabilă motor	110-240 V
Curent motor	13.9 A
Tensiune baterie	24 V
Durata de viața	3 – 5 ani
Unghiul șenilei	Unghiul șenilei după reglarea spătarului în trei poziții, potrivit pentru diferite niveluri/etaje.

CARACTERISTICI TEHNICE

1. Pentru spitale, centre de urgență, pompieri, ambulanțe de urgență, precum și pentru transportul familiei de bunuri pe scări.
2. Căruciorul/scaunul pentru scări este utilizat în principal pentru transferul pacienților în clădiri înalte, pe scări, sus și jos.
3. Sistem de alunecare extra-lat pentru un transfer mai sigur și mai ușor.
4. Materialele căruciorului pentru scări sunt realizate din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
5. Dimensiuni roți cărucior pentru scări: 127/76.2mm; roată spate cu frână.
6. Sistemul de alunecare este reglabil; utilizatorul poate ajusta strângerea.
7. Bara de ridicare cu trei poziții ajută operatorii de orice înălțime să mute căruciorul pe scări.
8. Două culori populare disponibile:
 - A. albastru, galben, negru (opțional)
 - B. verde
9. Suport pentru cap, stâlp IV, suport pentru oxigen – opționale.

Pregătirea dispozitivului mobil pentru urcat scări pentru utilizare

Verificarea nivelului de încărcare al bateriei

1. Fie pe dispozitivul de urcat scări, fie după ce a fost scos, porniți comutatorul negru.

- O înseamnă oprit
- I înseamnă pornit

2. Pe panoul de control cu afișaj LED poate fi afișată cantitatea de energie, de exemplu 91%.



Operarea dispozitivului mobil de urcat scări

Desfășurarea și plierea dispozitivului

Plierea dispozitivului de urcat scări

5. Apăsați zăvorul barei care are săgeata neagră, folosind mâna.



6. În timp ce bara este apăsată, împingeți mânerul în depărtare de corp, iar dispozitivul de urcat scări va începe să se plieze.

7. Prindeți centurile de siguranță pentru a vă asigura că dispozitivul de urcat scări rămâne pliat.



Încărcarea bateriei: pe dispozitivul mobil de urcat scări

3. Introduceți cablul de încărcare în portul dedicat și încărcați bateria.

4. După ce bateria este încărcată, deconectați direct cablul de încărcare.



Desfășurarea dispozitivului de urcat scări

Scoateți dispozitivul de urcat scări din locul de depozitare și desfăceți curea, ținând în același timp scaunul de urcat scările în poziție pliată.

Trageți scaunul dispozitivului în jos, către podea, și ascultați un „clic” atunci când scaunul se blochează în poziție.




Aplicarea frânelor

10. Apăsați ferm cu piciorul clapeta roșie a mecanismului de frânare pentru a activa frâna.



Extinderea mânerului de operare

12. Apăsați butonul roșu pentru a ridica sau coborî mânerul, astfel încât să se blocheze în poziția dorită.

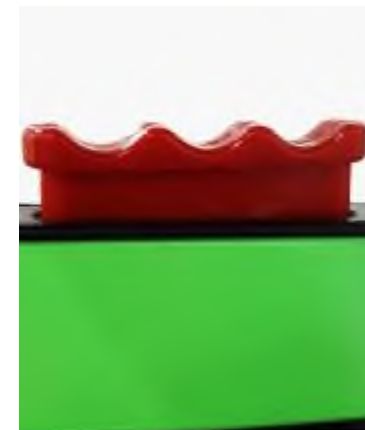

Eliberarea frânelor

11. Apăsați ferm pe clapeta gri pentru a elibera frâna.



În funcție de înălțimea operatorului, pot fi selectate 4 niveluri de înălțime.



Extinderea șinelor

14. Pe panoul de control cu afișaj LED este afișat butonul roșu într-un cadru pătrat: pliere șine și desfășurare șine.

15. Acesta poate controla extinderea șinelor la diferite unghiuri, de la 0° la 35°.



16. Tijă micro-push ajută la controlarea oricărui unghi de extindere a șinelor.



17. Apăsați butonul roșu pentru a opri șina la orice unghi, astfel încât să fie potrivită pentru scări cu diferite înclinații.



- **pliere șine:** reduce unghiul șinei împreună cu dispozitivul de urcat scări

- **desfășurare șine:** mărește unghiul șinei împreună cu dispozitivul de urcat scări



18. Apăsați butonul + sau - pentru a modifica viteza de urcare a scărilor.

19. + înseamnă creșterea vitezei, - înseamnă reducerea vitezei.

- DRAGON 1 = 1,7 sec./treaptă
- DRAGON 2 = 1,3 sec./treaptă
- DRAGON 3 = 1 sec./treaptă



Ecran tactil pentru dispozitivul de urcat scări

20. Acest buton, aflat într-un cadru roșu pătrat, este controlerul principal pentru urcarea scărilor.




Lumină de noapte

21. Butonul roșu marcat ca light este lumina de noapte.

Aceasta ajută la vizualizarea scărilor în zone întunecoase.

22. Când apăsați butonul roșu pentru lumină, lumina din spatele ecranului tactil se aprinde.

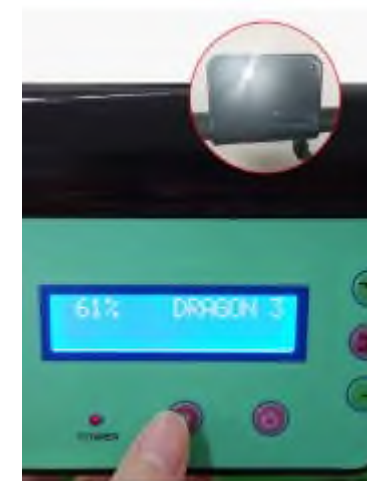

Controlul urcării scărilor

23. Cele două butoane cu simbolul scărilor — unul înseamnă urcare, celălalt coborâre. Săgeata indică direcția pentru urcare și pentru coborâre.



CURĂȚAREA

Curățați căruciorul motorizat pentru urcat scări și componentele sale cu o cârpă curată sau o perie moale și apă caldă cu săpun. Clătiți cu apă caldă și lăsați să se usuce natural.

Nu curățați cu produse care conțin înălbitor sau fenol. Dacă este necesar, se poate folosi o perie cu peri tari.



AVERTISMENT

Nu lăsați niciodată o persoană evacuată nesupravegheată în căruciorul motorizat pentru urcat scări și folosiți întotdeauna centurile de siguranță.

AVERTISMENT

Evitați schimbarea poziției brusc, deoarece acest lucru poate provoca rănirea persoanei evacuate. Susțineți căruciorul motorizat în timp ce reglați mânerul.

AVERTISMENT

Întreținerea necorespunzătoare poate provoca accidente. Întrețineți căruciorul motorizat doar conform scopului descris în acest manual.

AVERTISMENT

Este strict interzis să plasați acumulatorul în apă, să îl loviți, să îl scurcircuitați sau să îl expuneți la temperaturi ridicate. Dacă nu este folosit mai mult de 3 luni, trebuie să îl încărcați timp de 1 oră.



PROFILUL COMPANIEI

Despre noi

Dragon Industry (ZJG) Co., Ltd a fost înființată cu scopul de a oferi cel mai înalt nivel de calitate și servicii pe care această piață le-a cunoscut vreodată. Este un furnizor de top de produse medicale și pentru îngrijire, deserving toate segmentele pieței de sănătate, inclusiv spitale și clinici, cămine de bătrâni și facilități de îngrijire pe termen lung, cabinete medicale private și altele.

Ne specializăm în:

Seria pentru prim ajutor: Avem peste 100 de tipuri de targă de ambulanță, targă pentru scări, targă tip lingură, targă tip coș, targă militară, atele de tracțiune, pături de urgență etc.

Echipamente pentru spitale: Paturi de spital, mese de operație, suport pentru perfuzii, scaune pentru așteptare, mese de examinare, cărucioare medicale etc.

Scopul nostru: Prețuri rezonabile, calitate înaltă, livrare la timp, cele mai bune servicii – pentru că viețile depind de acestea.