

Pagina 1

Scaun rulant electric cu funcție de ridicare în poziție verticală KY139

(1) Introducerea produsului: scaunul rulant electric cu funcție de ridicare în poziție verticală utilizează principiul tijei electrice de împingere pentru a acționa șezutul, permițând utilizatorului să se ridice în picioare **fără ajutorul altor persoane**, având următoarele beneficii:

- ❖ favorizează circulația sângelui, îmbunătățește funcția cardiacă și pulmonară;
- ❖ previne infecțiile tractului urinar, reduce presiunea și evită apariția escarelor;
- ❖ utilizatorii de scaun rulant care stau așezați o perioadă lungă de timp pot dezvolta presiune abdominală, balonare frecventă, dureri abdominale, greață și vărsături. Scaunul rulant cu funcție de ridicare în poziție verticală poate reduce eficient aceste probleme fiziologice.

Exercițiile regulate de recuperare nu doar că pot încetini deteriorarea osteoporozei, ci pot și îmbunătăți mobilitatea articulațiilor și reduce atrofia musculară.

Pe lângă funcțiile menționate mai sus, în viața de zi cu zi, scaunul oferă un ajutor semnificativ pentru a ajunge la obiecte aflate la înălțime, pentru retrageri de numerar de la ATM, la ghișee sau la birouri. Mai important, din punct de vedere psihologic, facilitează participarea la evenimente sociale și revenirea în societatea principală.

KY139 este un scaun rulant electric cu funcție de ridicare în poziție verticală de nivel avansat, produs pe plan intern; aplicabilitatea și caracterul său practic sunt comparabile cu produsele similare din străinătate, având avantaje clare de cost și preț. Scaunul rulant electric oferă un sprijin important în viața și activitatea profesională a persoanelor cu paraplegie, hemiplegie sau slăbiciune a membrelor inferioare care nu pot sta în picioare.

(2) Domeniul de aplicare al funcției de ridicare în poziție verticală a scaunului rulant este destinat exclusiv persoanelor ale căror membre inferioare, genunchi și gambe, de la gambă până la picior, nu prezintă leziuni sau traumatisme. Nu este potrivit pentru următoarele situații:

- ❖ persoane cu insuficiență a membrelor inferioare în poziție ortostatică, inclusiv slăbiciune a unui membru inferior sau a ambelor membre inferioare;
- ❖ orice fragilitate osoasă a membrelor inferioare, care nu poate susține greutatea corpului uman;
fracturi ale oricărei părți a membrelor inferioare;
- ❖ distanța de la centrul genunchiului până la călcâi mai mică de 45 cm;
- ❖ slăbiciune a membrelor superioare sau lipsa acestora, în cazurile în care membrele superioare nu pot controla operarea controllerului;
- ❖ imposibilitatea corpului de a susține poziția verticală din cauza coloanei vertebrale;
- ❖ minori;
- ❖ lipsa sensibilității la nivelul membrelor inferioare.

Notă: nu utilizați funcția de ridicare în poziție verticală pe pante sau pe drumuri denivelate. Vă rugăm să opriți controllerul atunci când scaunul rulant este în poziție verticală!!!

Timpul unei ridicări nu trebuie să depășească **30 de minute**; la fiecare 30 de minute este necesar să reveniți în poziția șezut pentru a vă odihni timp de **10 minute**, astfel încât zonele gambei să își poată restabili circulația sanguină.

Dacă aveți întrebări înainte de achiziție, vă rugăm să contactați echipa noastră de vânzări pentru consultanță pre-vânzare sau să urmați recomandările medicului dumneavoastră. În cazul în care utilizarea necorespunzătoare conduce la vătămări corporale, compania nu își asumă nicio responsabilitate.

Pagina 2

[illegible]

(1) Caracteristici ale produsului

- Se adoptă combinația de oțel de înaltă calitate prin sudare, cu o structură frumoasă și compactă, puternică și durabilă;
- Pedala ajustabilă este potrivită pentru ajustare individuală;
- Se adoptă cotierele posterioare și placa de separație, pentru ca utilizatorii să treacă cu ușurință din scaunul cu roțile către alte facilități;
- Perna pentru șezut este realizată dintr-o țesătură de plasă rezistentă, cu burete elastic de înaltă densitate, iar forma pernei este adaptată curburii corpului uman;
- Perna pentru genunchi - lată, fiind punctul cheie pentru poziția de ridicare, este realizată cu un sistem de închidere tip cataramă, ușor și convenabil de utilizat; în același timp, sunt folosite burete elastic de înaltă densitate și țesătura respirabilă pentru fabricarea materialelor;
- Roțile din față și din spate sunt ambele roți solide, inflabile, pentru a evita pericolele cauzate de pene, iar designul unic al benzii de rulare asigură o aderență mai bună; frâna este mai precisă;
- Motorul este matur și stabil, silențios și economic; tija electrică are un zgomot scăzut și o forță mare de împingere;
- Capacitatea bateriei este de 28AH, iar autonomia ajunge până la 20 km;
- Controller-ul PG din Marea Britanie asigură stabilitate și agilitate, oferindu-vă cea mai bună senzație de control.

(2) Utilizarea produsului

1. Metoda de utilizare a controlerului

Notă: Vă rugăm să nu utilizați funcția de ridicare pe terenuri accidentate. Când scaunul cu roțile este în poziția de ridicare sau utilizatorul se mișcă, vă rugăm să opriți controlerul!!! Pentru a porni controlerul, apăsați butonul **POWER**, iar ecranul de putere va arăta nivelul de energie rămas. **HORN** emite un sunet de avertizare, iar **SPEED DISPLAY LAMP** arată viteza setată anterior.

Când folosiți funcția de ridicare, vă rugăm să țineți cont de următoarele:

(3) Porniți comutatorul încărcătorului; LED-ul roșu se aprinde, iar LED-ul alb devine galben, indicând faptul că bateria se află în proces de încărcare. Durata de încărcare poate varia în funcție de starea bateriei și poate dura între **4 și 8 ore**.

(4) Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul alb devine verde.

(5) Deconectați fișa de alimentare a încărcătorului de la sursa de curent electric, apoi scoateți fișa de încărcare din interfața de încărcare. Pentru scaunele rulante electrice destinate vânzării pe piața internă, tensiunea setată din fabrică este, în general, **230 V**. Dacă scaunul rulant este utilizat în afara țării, vă rugăm să selectați tensiunea corespunzătoare în funcție de tensiunea rețelei electrice din orașul/localitatea respectivă.

!!! Nu utilizați încărcătoare deteriorate sau încărcătoare neoriginale care nu sunt furnizate împreună cu produsul. Este interzisă deschiderea carcasei încărcătorului. În timpul încărcării, asigurați-vă că încărcătorul și scaunul rulant electric se află într-un spațiu deschis, bine ventilat și uscat. Pe durata încărcării, în raza de **1 metru** din jurul scaunului rulant nu trebuie depozitate materiale inflamabile. Selectorul de tensiune trebuie setat pe poziția corespunzătoare tensiunii rețelei electrice locale sau pe o poziție echivalentă. Dacă apare orice problemă, vă rugăm să contactați un agent de service autorizat sau producătorul.

Pagina 5

[illegible]

Sfaturi de siguranță

☆ Pentru utilizarea scaunului rulant, acesta trebuie să fie **instalat și testat**. Dacă aveți orice nelămuriri, vă rugăm să consultați distribuitorul autorizat sau serviciul nostru de relații cu clienții.

☆ Unii utilizatori sunt rugați să exerseze **într-o zonă largă și plană**, pentru a se familiariza cu modul de operare și cu caracteristicile scaunului rulant.

☆ Pentru transferul din scaunul rulant către alte locuri, vă rugăm să vă asigurați că **controllerul este în stare oprită.**

☆ Atunci când scaunul rulant se află în **poziție verticală**, nu împingeți alte persoane sau utilizatorul și nu operați scaunul rulant. Este **interzisă utilizarea pe pante sau pe drumuri denivelate**.

☆ Capacitatea de depășire a obstacolelor a scaunului rulant este de **4 cm**. Nu încercați să treceți peste obstacole mai mari de 4 cm.

☆ Unele scaune rulante electrice pot prezenta dificultăți de deplasare pe suprafețe foarte alunecoase (de exemplu, gheață) sau pe suprafețe foarte accidentate (de exemplu, pietriș, pietre).

☆ Capacitatea de urcare a scaunului rulant este **mai mică sau egală cu 12°**.

☆ În timpul procesului de încărcare, vă rugăm să vă asigurați că **controllerul este oprit**.

☆ Pentru o siguranță sporită, vă rugăm să **fixați centura de siguranță în timpul deplasării.**

Metode de întreținere

1. Vă rugăm să amplasați scaunul rulant într-un loc **uscat și bine ventilat** și să evitați contactul cu uleiuri, acizi, alcalii și alte substanțe chimice corozive.
2. Mențineți caroseria curată; puteți utiliza un detergent neutru obișnuit pentru a șterge suprafața. După curățare, ștergeți scaunul rulant la timp și aplicați ulei lubrifiant în punctele de rulare.
3. Evitați expunerea scaunului rulant la soare și ploaie; nu spălați scaunul rulant cu jet de apă și nu faceți duș cu acesta. Dacă pătrunde apă, uscați imediat bateria, controllerul și motorul și adăugați lubrifiant adecvat în zonele cu rulmenți.
4. Scaunul rulant este un **echipament electric**. Este strict interzisă utilizarea acestuia pentru sport, curse, înot sau alte activități sportive.
5. Verificați periodic **presiunea anvelopelor pneumatice** și gradul de uzură al profilului. Dacă este necesar, înlocuiți anvelopele.
6. Verificați regulat dacă **șuruburile sunt slăbite**; dacă da, acestea trebuie strânse imediat.
7. Curățați periodic **impuritățile din rulmenții roților** (de exemplu: păr, fire textile etc.).

Reglementări privind garanția

1. Motorul, controllerul și încărcătorul beneficiază de **garanție de un an**, iar bateria beneficiază de **garanție de șase luni**.
2. Perioada de garanție începe de la **data achiziției scaunului rulant**.
3. Documentele care trebuie furnizate de către vânzător sunt: **manualul de garanție completat integral și ștampilat**.
4. Pe durata perioadei de garanție, atunci când clientul constată defecte ale scaunului rulant, acesta trebuie să **notifice imediat vânzătorul**. La efectuarea reparațiilor, vă rugăm să prezentați acest manual. În cazul respectării condițiilor prevăzute la primul paragraf al acestui contract, compania va **repara sau va înlocui piesele deteriorate**.

Pagina 6

[illegible]

Piesele deteriorate care sunt **înlocuite gratuit în perioada de garanție** devin **proprietatea companiei noastre**.

În cazul în care **persoane neautorizate** efectuează modificări ale structurii scaunului rulant sau dacă **reparațiile și înlocuirile nu sunt realizate folosind piese originale ale companiei noastre**, perioada de garanție va fi **anulată**. Pentru orice pierderi rezultate, compania **nu își asumă nicio responsabilitate**.

Următoarele situații nu sunt acoperite de garanție:

A. Lipsa manualului de garanție;

B. Mențiuni în manualul de garanție care indică faptul că **modelul scaunului rulant nu corespunde sau că modelul a fost modificat;**

C. Anvelopele interioare și exterioare, precum și anvelopele interioare și exterioare ale roții directe frontale **nu sunt incluse în garanție**;

D. Pierderi și daune cauzate de **neutilizarea conform instrucțiunilor de exploatare**;

E. Situații de **forță majoră sau accidente**, inclusiv, dar fără a se limita la incendii, inundații, cutremure, accidente auto etc.;

F. Defecțiuni cauzate de **uzura naturală**, deteriorări externe sau întreținere necorespunzătoare a scaunului rulant, inclusiv:

- ❖ deformarea pernei scaunului ca urmare a utilizării;
- ❖ deteriorarea rulmenților din cauza pătrunderii apei sau a lipsei lubrifierii cu ulei, ducând la ruginire;
- ❖ fisuri și deteriorări ale materialului cotierei (această componentă beneficiază de garanție de trei luni);
- ❖ slăbirea sau ruperea roții de tracțiune;
- ❖ decolorarea pieselor metalice;
- ❖ zgârieturi de suprafață și modificări de culoare ale stratului de vopsea cauzate de frecarea pieselor mobile;
- ❖ deteriorări ale suprafeței cauzate de coliziuni;
- ❖ deformarea cadrului, deteriorări prin impact, fisuri și avarii ale altor componente cauzate de căderi;
- ❖ zgomote apărute în timpul utilizării ca urmare a pornirilor, opririlor sau virajelor bruște;
- ❖ ruperea panoului lateral ca urmare a presiunii sau comprimării.

Pentru situațiile care **depășesc perioada de garanție** sau nu sunt acoperite de aceasta, compania va oferi **servicii de reparație contra cost**.